

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-dwufunkcyjny-kroczaco-statyczny-p-540.html>



Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny)

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	120,37 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-B-TGO-FS 913L

Opis produktu

Balkonik dwufunkcyjny krocząco-statyczny - bezpieczne wsparcie dla seniora

Balkonik dla osoby starszej to często klucz do odzyskania autonomii i pewności podczas poruszania się. Prezentowany model łączy tryb kroczący i statyczny, dzięki czemu wspiera zarówno aktywny spacer, jak i stabilne stanie. W efekcie senior sam decyduje, kiedy potrzebuje dynamiki, a kiedy maksymalnego podparcia.

Dlaczego warto wybrać chodzik dla osoby starszej?

- Komfort i bezpieczeństwo – szerokie pole podparcia oraz antypoślizgowe nasadki zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Lekka, wzmocniona rama – aluminium o podwyższonej wytrzymałości utrzymuje do 136 kg przy wadze zaledwie 2,9 kg.
- Regulacja wysokości 72-91 cm – łatwe dopasowanie do wzrostu użytkownika poprawia ergonomię chodu.
- Funkcja składania – balkonik dla starszej osoby mieści się w bagażniku auta lub w szafie.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita: 55 cm
- Szerokość wewnętrzna: 46 cm
- Głębokość całkowita: 46 cm
- Wysokość całkowita: 72 - 91 cm
- Waga: 2,9 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Kolor ramy: brązowy lub srebrny
- Tolerancja wymiarów: +/- 0,5 - 1 cm

Balkonik krocząco-statyczny - jak to działa?

Tryb kroczący

Każdą stronę urządzenia wysuwa się naprzemiennie, imitując krok. Rozwiązanie to aktywuje mięśnie, wspiera koordynację i przyspiesza rehabilitację kończyn dolnych.

Tryb statyczny

Obie nogi balkonika pozostają równocześnie na podłożu. Stabilne podparcie ułatwia pionizację, wstawanie z łóżka lub krzesła oraz krótkie postoje.

Jak prawidłowo dobrać wysokość?

- Stań prosto w wygodnym obuwii.
- Zmierz odległość od nadgarstka (wyrostka rylcowatego kości promieniowej) do podłoża.
- Ustaw nóżki balkonika na identyczną wartość.

Zbyt nisko ustawiony chodzik dla osoby starszej wymusza pochylenie, a zbyt wysoki ogranicza stabilność. Właściwa regulacja sprzyja prawidłowej postawie i zmniejsza nacisk na barki.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy balkonik mieści się w standardowym bagażniku auta?

Tak, po złożeniu jego maksymalna szerokość wynosi 55 cm, co pasuje do większości pojazdów osobowych.

Czy gumowe nasadki można wymienić?

Oczywiście. W naszym sklepie medycznym dostępne są oryginalne akcesoria w rozmiarze 22 mm.

Jaki jest okres gwarancji?

Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji.

Jeśli szukasz pewnego podparcia dla bliskiej osoby, balkonik dwufunkcyjny krocząco-statyczny to sprawdzony wybór. Łączy zalety dynamicznego chodzika i stabilnej podpórki, zwiększając niezależność oraz bezpieczeństwo użytkownika. Zamów już dziś w naszym sklepie medycznym i pomóż seniorowi wrócić do aktywnego, bezpiecznego życia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Srebrny , Miedziany