

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/flowtim-timago-aktywny-wozek-inwalidzki-aluminiowy-od-11-kg-p-3530.html>



FLOW-TIM Timago – aktywny wózek inwalidzki aluminiowy od 11 kg

Cena brutto	1 940,00 zł
Cena netto	1 796,30 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FLOW-TIM

Opis produktu

FLOW-TIM – lekki aktywny wózek inwalidzki od 11 kg

Gdy użytkownik nie może bezpiecznie pokonywać dłuższych odległości pieszo, potrzebuje wózka dopasowanego do swojej budowy ciała, sposobu poruszania się oraz możliwości samodzielnego napędzania. Przy wyborze modelu przewożonego samochodem znaczenie mają również masa konstrukcji, możliwość złożenia ramy, demontaż tylnych kół oraz wymiary wózka po złożeniu.

FLOW-TIM Timago to lekki, aktywny wózek inwalidzki z aluminiową ramą, przeznaczony do samodzielnego napędzania za pomocą ciągów lub prowadzenia przez opiekuna. Zależnie od wybranej szerokości siedziska i rozmiaru tylnych kół waży **od 11 do 11,97 kg**.

Do wyboru są trzy szerokości siedziska: **43, 46 oraz 48 cm**. Wersja z siedziskiem 46 cm występuje z tylnymi kołami 22" albo 24". Maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka wynosi **115 kg**.

Składana rama, składane oparcie, zdejmowane podnóżki oraz szybkozłączki tylnych kół ułatwiają przygotowanie wózka do przechowywania i przewożenia. Regulacja środka ciężkości pozwala natomiast dopasować stabilność i sposób reagowania konstrukcji do sprawności oraz doświadczenia użytkownika.

Najważniejsze funkcje wózka FLOW-TIM

- **lekka aluminiowa konstrukcja** – masa wynosi od 11 do 11,97 kg, zależnie od konfiguracji;
- **regulacja środka ciężkości** – umożliwia zmianę ustawienia wózka odpowiednio do sposobu poruszania się użytkownika;
- **trzy szerokości siedziska** – 43, 46 lub 48 cm;
- **tylne koła 22" lub 24"** – rozmiar zależy od wybranej konfiguracji;
- **ciągi napędowe** – pozwalają użytkownikowi samodzielnie napędzać wózek rękami;
- **szybkozłączki tylnych kół** – ułatwiają ich demontaż przed transportem;
- **składana rama i oparcie** – pomagają zmniejszyć wymiary wózka podczas przewożenia;
- **hamulce dla osoby prowadzącej** – zapewniają opiekunowi dodatkową kontrolę;
- **odchylane podłokietniki** – ułatwiają dostęp do siedziska i przesiadanie się;
- **uchylne i zdejmowane podnóżki** – umożliwiają przygotowanie przestrzeni przed siedziskiem;
- **pas bezpieczeństwa i kółka antywywrotne** – stanowią dodatkowe wyposażenie zabezpieczające;
- **maksymalne obciążenie 115 kg** – określa dopuszczalną masę użytkownika.

Masa wózka zależy od wybranej konfiguracji

Określenie „wózek inwalidzki 11 kg” dotyczy najlżejszej wersji FLOW-TIM z siedziskiem 43 cm i tylnymi kołami 22". Pozostałe warianty są nieco cięższe. Przed zakupem należy więc sprawdzić masę konkretnej konfiguracji, a nie odnosić wartości 11 kg do wszystkich dostępnych wersji.

Szerokość siedziska	Rozmiar tylnych kół	Masa wózka
43 cm	22"	11,00 kg
46 cm	22"	11,47 kg
46 cm	24"	11,97 kg
48 cm	22"	11,55 kg

Wariant z siedziskiem 46 cm i kołami 24" jest najcięższą konfiguracją i waży 11,97 kg. Najlżejsza wersja 43 cm z kołami 22" waży 11 kg. Wszystkie podane wartości pozostają poniżej 12 kg.

Dla kogo przeznaczony jest FLOW-TIM?

FLOW-TIM jest przeznaczony dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, które nie mogą chodzić samodzielnie albo szybko męczą się podczas pokonywania większych odległości.

Model może być dobrym wyborem, gdy:

- użytkownik chce samodzielnie napędzać wózek rękami;
- wózek ma być również prowadzony przez członka rodziny lub opiekuna;
- sprzęt będzie regularnie składany i przewożony samochodem;
- poszukiwana jest konstrukcja o masie nieprzekraczającej 12 kg;
- ważna jest możliwość regulacji środka ciężkości;
- potrzebne jest siedzisko o szerokości 43, 46 albo 48 cm;
- maksymalna masa użytkownika nie przekracza 115 kg;
- potrzebne są hamulce obsługiwane również przez osobę prowadzącą;
- wózek będzie używany w domu, placówce, podczas wizyt lekarskich, spacerów i codziennych wyjazdów.

Produkt może być wyszukiwany również jako **wózek ręczny, wózek manualny, lekki wózek rehabilitacyjny, wózek dla osoby niepełnosprawnej, składany wózek do samochodu** albo **wózek z hamulcami dla opiekuna**.

Aktywny wózek inwalidzki – co to oznacza?

FLOW-TIM ma tylne koła wyposażone w ciągi napędowe. Użytkownik dysponujący odpowiednią sprawnością kończyn górnych może samodzielnie wprawiać wózek w ruch, kontrolować kierunek jazdy i zmniejszać prędkość za pomocą ciągów.

Określenie „aktywny” odnosi się również do możliwości regulacji ustawienia kół i środka ciężkości. FLOW-TIM pozostaje jednak składanym wózkiem na ramie krzyżakowej. Nie jest indywidualnie wykonywanym, sztywnym wózkiem sportowym.

Regulacja środka ciężkości – po co jest potrzebna?

Ustawienie środka ciężkości wpływa na stabilność konstrukcji, zwrotność oraz sposób reagowania wózka podczas napędzania i wykonywania manewrów. Odpowiednia konfiguracja może ułatwić samodzielną jazdę i dopasować zachowanie wózka do doświadczenia użytkownika.

Stabilniejsze ustawienie może być odpowiednie dla osoby rozpoczynającej samodzielne poruszanie się na wózku. Bardziej aktywna konfiguracja może ułatwić wykonywanie manewrów, ale wymaga większej kontroli.

Regulację należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Po zmianie ustawienia kół trzeba sprawdzić stabilność konstrukcji, położenie siedziska oraz prawidłowe działanie hamulców.

Samodzielna jazda lub prowadzenie przez opiekuna

Tylne koła z ciągami pozwalają użytkownikowi samodzielnie napędzać wózek. Przy uchwytach dla osoby prowadzącej znajdują się dodatkowe hamulce, które pomagają kontrolować prędkość i zatrzymać wózek bez konieczności sięgania do kół.

Hamulce dla opiekuna są przydatne podczas spacerów, zatrzymywania, prowadzenia po pochylej nawierzchni i przemieszczania się w zatłoczonych miejscach. Model posiada również hamulce postojowe zabezpieczające wózek po zatrzymaniu.

Jak wybrać szerokość siedziska?

FLOW-TIM jest dostępny z siedziskiem o szerokości **43, 46 lub 48 cm**. Głębokość siedziska w każdym wariantcie wynosi 40 cm.

- **43 cm** – wariant dla osoby o drobniejszej lub średniej budowie ciała;
- **46 cm** – wariant zapewniający więcej przestrzeni w obrębie bioder i dostępny z kołami 22" albo 24";
- **48 cm** – najszerszy wariant dla osoby potrzebującej większej przestrzeni na siedzisku.

Pomiar najlepiej wykonać w pozycji siedzącej i w odzieży podobnej do tej, w której wózek będzie używany. Siedzisko nie powinno uciskać bioder, ale nie może również pozostawiać nadmiernego luzu.

Zbyt szeroki wariant może utrudniać utrzymanie właściwej pozycji, wygodne sięganie do ciągów oraz przejazd przez węższe drzwi. Przed zakupem należy porównać szerokość całkowitą wybranej wersji z szerokością przejść, windy i drzwi w miejscu użytkowania.

Koła 22" czy 24" – który wariant wybrać?

Wariant z siedziskiem 46 cm może zostać wyposażony w tylne koła 22" albo 24". Rozmiar koła wpływa na położenie ciągów względem użytkownika i sposób ich chwytania podczas samodzielnego napędzania.

Dobór powinien uwzględniać budowę ciała, długość kończyn górnych, zakres ruchu oraz sposób korzystania z wózka. Użytkownik powinien mieć możliwość wygodnego sięgania do ciągów bez nadmiernego unoszenia barków i pochylania tułowia.

Rozmiaru kół nie należy wybierać wyłącznie na podstawie wyglądu wózka. W razie wątpliwości warto skonsultować konfigurację z osobą prowadzącą rehabilitację lub sprzedawcą sprzętu medycznego.

Składanie wózka do transportu

Rama FLOW-TIM składa się krzyżakowo, a oparcie można dodatkowo złożyć. Po złożeniu wózek ma wymiary około **106 x 29 x 92 cm**. Szybkozłączki umożliwiają wypięcie tylnych kół, a podnóżki można uchylić lub zdemontować.

Przed przygotowaniem wózka do transportu należy uruchomić hamulce postojowe, zdemontować elementy przeznaczone do wypięcia, złożyć oparcie i ramę, a następnie zabezpieczyć wszystkie części przed przemieszczaniem się w bagażniku.

Informacja, że wózek jest składany, nie oznacza automatycznie, że zmieści się w każdym samochodzie. Przed zakupem należy porównać wymiary konstrukcji z szerokością otworu i przestrzenią konkretnego bagażnika.

Odchylane podłokietniki i zdejmowane podnóżki

Odchylane podłokietniki ułatwiają dostęp do siedziska oraz mogą pomóc podczas przesiadania się bokiem między wózkiem a łóżkiem lub fotelem. Przed transferem wózek należy unieruchomić za pomocą hamulców postojowych.

Podnóżki można uchylić na boki lub zdemontować. Rozwiązanie to zwalnia przestrzeń przed siedziskiem, ułatwia zajęcie miejsca i pozwala zmniejszyć gabaryty sprzętu podczas transportu. Taśmy zabezpieczające pomagają utrzymać stopy na platformach.

Wyposażenie wózka FLOW-TIM

- składana rama aluminiowa;
- składane oparcie;
- regulacja ustawienia kół i środka ciężkości;
- odchylane podłokietniki;
- uchylne i zdejmowane podnóżki z taśmami zabezpieczającymi;
- tylne koła 22" lub 24", zależnie od wariantu;
- ciągi umożliwiające samodzielne napędzanie;
- szybkozłączki tylnych kół;
- hamulce postojowe;
- hamulce dla osoby prowadzącej;
- pas bezpieczeństwa użytkownika;
- kółka antywywrotne.

Kiedy wybrać inny wózek?

- Jeżeli użytkownik potrzebuje zagłówka, odchylanego oparcia i stabilizacji tułowia – należy wybrać model neurologiczny.
- Jeżeli potrzebny jest napęd silnikowy – FLOW-TIM jest wózkiem ręcznym.
- Jeżeli masa użytkownika przekracza 115 kg – należy dobrać model o wyższym dopuszczalnym obciążeniu.
- Jeżeli potrzebne jest siedzisko szersze niż 48 cm – FLOW-TIM nie zapewnia właściwego wariantu.
- Jeżeli wózek ma być używany wyłącznie do przewożenia przez opiekuna – można rozważyć mniejszy model transportowy.

- Jeżeli użytkownik wymaga stabilizacji głowy i pleców – należy wybrać wózek przeznaczony do potrzeb neurologicznych.

Dane techniczne FLOW-TIM

Producent	Timago
Model	FLOW-TIM
Rodzaj	aktywny wózek inwalidzki ręczny / manualny
Rama	aluminiowa, składana
Wymiary siedziska	43 x 40 cm, 46 x 40 cm lub 48 x 40 cm
Szerokość całkowita	61 / 64 / 66 cm
Głębokość całkowita	106 cm
Wysokość całkowita	100-106 cm
Wysokość siedziska od podłoża	50 cm
Wymiary po złożeniu	106 x 29 x 92 cm
Masa	11,00-11,97 kg, zależnie od konfiguracji
Maksymalna masa użytkownika	115 kg
Tylne koła	22" lub 24", zależnie od wariantu
Sposób napędzania	samodzielnie za pomocą ciągów lub przez osobę prowadzącą
Regulacja środka ciężkości	tak
Szybkość jazdy tylnych kół	tak
Hamulce dla osoby prowadzącej	tak
Podłokietniki	odchylane
Podnóżki	uchylne i zdejmowane, z taśmami zabezpieczającymi
Pas bezpieczeństwa	tak
Kółka antywymrotne	tak

FLOW-TIM, DRIFT-TIM czy FRODO – który model wybrać?

FLOW-TIM warto wybrać, gdy potrzebne są trzy szerokości siedziska: 43, 46 lub 48 cm, masa od 11 kg oraz możliwość wyboru kół 22" lub 24" w wersji 46 cm. Maksymalne obciążenie modelu wynosi 115 kg.

Jeżeli użytkownik potrzebuje większego maksymalnego obciążenia, może porównać FLOW-TIM z [aktywnym wózkiem DRIFT-TIM Timago](#). DRIFT-TIM ma dopuszczalne obciążenie 136 kg, siedzisko 43 lub 46 cm oraz tylne koła 24".

Osoby poszukujące modelu z maksymalnym obciążeniem 125 kg i siedziskiem 44, 46 lub 49 cm mogą sprawdzić [aktywny wózek inwalidzki FRODO Timago](#).

Podobne wózki Timago

- [Premium-TIM Timago](#) – model z poduszką, odpinaną tapicerką i siedziskiem 43, 46 lub 48 cm;
- [EVERYDAY-TIM T101](#) – model z większym wyborem szerokości i konfiguracjami przeznaczonymi również dla osób po amputacji;
- [SIMPLE-TIM Timago](#) – model ogólnego zastosowania z wyborem pełnych lub pompowanych kół;
- [NEURO-TIM Timago](#) – model dla osoby potrzebującej zagłówka, podparcia tułowia i odchylanego oparcia.

Pozostałe modele można porównać w kategorii [wózków inwalidzkich ręcznych](#).

FLOW-TIM jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.