

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

1. PRZEZNACZENIE

Uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych pomaga w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się, zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń sanitarnych. Wyrób ten przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zdrowia itp.

2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Uchwyt można zamocować do podłoża w pozycji poziomej, pionowej, bądź pod kątem w zależności od rodzaju uchwytu oraz potrzeb użytkowników.

Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w rozetce.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków a między podłoże a uchwyt założyć podkładki plastikowe (uszczelki) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w danym rodzaju uchwytu.

Dołączone do uchwytu wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki, należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania uchwytów na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu uchwytu należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.

3. DEZYNFEKCJA

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT.
UCHWYT NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRETY.**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.