

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30-p-bez-licznika-czasu-pracy-p-1003.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2×30 P (bez licznika) – Ultraviol

Cena brutto	897,00 zł
Cena netto	729,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-2x30-P
Kod producenta	NBV 2x30

Opis produktu

Profesjonalna lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2×30 P – skuteczna dezynfekcja pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2×30 P (Ultraviol Polska) to urządzenie do **dezynfekcji metodą bezpośredniego działania**, przeznaczone do utrzymania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Model **bez licznika czasu pracy** sprawdzi się tam, gdzie liczy się prosta obsługa, powtarzalny proces oraz trwała konstrukcja do pracy ciągłej.

W lampie zastosowano **2 promienniki UV-C 30 W**. Odbłyśnik wykonany z **wysokiej jakości aluminium odblaskowego** wspiera efektywne kierowanie promieniowania. Dodatkowo konstrukcja umożliwia **ustawienie kąta naświetlania w zakresie do 270°**, co ułatwia dopasowanie pracy urządzenia do układu pomieszczenia i stref wymagających dezynfekcji.

Gdzie stosuje się lampę NBV-2×30 P?

- bloki operacyjne, gabinety zabiegowe i opatrunkowe, sale chorych, przychodnie,
- laboratoria, apteki, pomieszczenia przygotowania i przechowywania materiałów,
- przemysł farmaceutyczny, spożywczy i kosmetyczny – strefy wymagające podwyższonego reżimu higienicznego.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Lampy UV-C bezpośredniego działania pracują **podczas nieobecności ludzi i zwierząt**. Promieniowanie UV-C nie jest przeznaczone do ekspozycji skóry i oczu. Przed uruchomieniem zaplanuj czas i sposób naświetlania, a po zakończeniu – zgodnie z procedurą placówki – przewietrz pomieszczenie.

Najważniejsze korzyści

- **Atest PZH** – potwierdzenie przydatności do zastosowań higienicznych,
- **2×30 W UV-C** oraz natężenie promieniowania w odległości 1 m: **3,6 W/m²**,
- **regulacja kierunku naświetlania do 270°** – łatwiejsze ustawienie pracy,
- **trwałość promienników 9000 h** (deklarowana przez producenta),
- **praca ciągła**, stabilna konstrukcja i zasilanie z gniazdka 230 V.

Dane techniczne (NBV-2×30 P)

- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**

-
- Pobór mocy: **66 W**
 - Promienniki UV-C: **2×30 W**
 - Natężenie UV-C (1 m): **3,6 W/m²**
 - Trwałość promiennika: **9000 h**
 - Deklarowana dezynfekowana powierzchnia: **18-22 m²**
 - Zakres ustawienia kąta naświetlania: **do 270°**
 - Klasa zabezpieczenia ppoż.: **I**
 - Stopień ochrony obudowy: **IP20**
 - Rodzaj pracy: **ciągła**
 - Wymiary kopuły: **960 × 85 × 145 mm**
 - Masa kopuły: **5 kg**
 - Wysokość statywu: **1800 mm**
 - Przewód: **wtyczka do gniazdka**

Zobacz też inne rozwiązania do higieny pomieszczeń w Salemed.pl:

- [Lampy wirusobójcze i bakteriobójcze UV-C](#)
- [Sprzęt dla placówek medycznych](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.