

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030nl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1063.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 NL naścienna



Cena brutto	2 373,00 zł
Cena netto	1 929,27 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60/30 NL
Kod producenta	NBVE 60/30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 NL naścienna

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 NL marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne, naścienne urządzenie przeznaczone do poprawy standardu higieny powietrza oraz okresowej dezynfekcji pomieszczeń w placówkach medycznych i innych przestrzeniach wymagających wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej. Model dwufunkcyjny łączy **tryb przepływowy**, umożliwiający pracę urządzenia podczas obecności personelu i pacjentów, z **zewnętrznym promiennikiem UV-C**, stosowanym do dezynfekcji pomieszczenia podczas jego czasowego wyłączenia z użytkowania.

To rozwiązanie szczególnie cenione w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, laboratoriach, poczekalniach, izbach przyjęć, salach chorych i korytarzach. Dzięki połączeniu dwóch funkcji użytkownik może lepiej dopasować sposób pracy lampy do rytmu placówki, charakteru pomieszczenia oraz liczby osób przebywających w środku.

Dlaczego warto wybrać lampę NBVE-60/30 NL?

Model NBVE-60/30 NL został zaprojektowany z myślą o obiektach, w których liczy się nie tylko skuteczność, ale również praktyczność codziennego użytkowania. Wewnętrzny układ przepływowy wspiera dezynfekcję powietrza w obiegu roboczym pomieszczenia, natomiast zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania może być używany wtedy, gdy w pomieszczeniu nie przebywają ludzie. Taki podział funkcji zwiększa elastyczność użytkowania i pozwala lepiej organizować procedury higieniczne.

Urządzenie należy do modeli energooszczędnych, a ograniczenie poboru mocy w porównaniu z innymi rozwiązaniami może przełożyć się na realne oszczędności eksploatacyjne. To ważne szczególnie tam, gdzie lampy UV-C pracują regularnie przez wiele godzin dziennie.

Zastosowanie w placówkach medycznych i profesjonalnych

Naścienna lampa UV-C NBVE-60/30 NL dobrze sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wsparcie procedur higienicznych i ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w powietrzu oraz na powierzchniach. Jest chętnie wybierana do:

- gabinetów lekarskich i zabiegowych,
- sal chorych i izolatek,
- laboratoriów i punktów pobrań,
- izb przyjęć, poczekalni i korytarzy,

-
- pomieszczeń socjalnych i administracyjnych w obiektach medycznych.

Dobór lampy powinien zawsze uwzględniać kubaturę pomieszczenia, częstotliwość użytkowania oraz sposób organizacji pracy personelu. Właśnie dlatego modele dwufunkcyjne są często wybierane przez placówki, które potrzebują zarówno trybu ciągłego, jak i intensywnej dezynfekcji w wyznaczonych przedziałach czasu.

Najważniejsze parametry techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 115 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 µW/cm²,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 132 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³,
- zasięg działania lampy: 10-20 m²,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- wymiary całkowite: 1190 x 285 x 145 mm,
- masa: 9 kg,
- montaż do instalacji elektrycznej, przewód zakończony kostką.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania

Lampa została wyposażona w licznik czasu pracy promienników z wyświetlaczem, co ułatwia kontrolę eksploatacji urządzenia oraz planowanie wymiany źródeł UV-C. Dostępna jest również opcja zamówienia elektronicznego licznika z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które chcą prowadzić bardziej precyzyjny nadzór nad serwisem i utrzymać wysoką skuteczność działania urządzenia w dłuższym okresie.

Atutem modelu jest także [atest PZH](#), który zwiększa wiarygodność produktu i ma znaczenie dla wielu podmiotów publicznych, medycznych oraz prywatnych gabinetów poszukujących urządzeń od sprawdzonych producentów.

Podsumowanie

NBVE-60/30 NL naścienna to lampa UV-C dla użytkowników, którzy szukają rozwiązania profesjonalnego, trwałego i dopasowanego do realnej pracy placówki. Połączenie technologii przepływowej z dodatkowym promiennikiem bezpośredniego działania daje większą kontrolę nad organizacją dezynfekcji niż w przypadku modeli jednofunkcyjnych. To urządzenie, które wspiera codzienną dbałość o higienę powietrza i pomieszczeń, a jednocześnie pozwala zachować wygodę użytkowania oraz przewidywalność kosztów eksploatacyjnych.

Sprawdź także: [lampy bakteriobójcze przepływowe](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#) oraz [model NBVE-60 NL naścienny](#).

Modele dwufunkcyjne są często wybierane tam, gdzie potrzebna jest elastyczność: praca przepływowa w godzinach użytkowania pomieszczenia oraz intensywna dezynfekcja bezpośrednia poza czasem przyjęć.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.