

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-uv-c-nbve-60-nl-nascienna-p-1044.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 NL naścienna



Cena brutto	1 722,00 zł
Cena netto	1 400,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-60-NL
Kod producenta	NBVE 60

Opis produktu

Przepływowa lampa bakteriobójcza UV-C NBVE-60 NL – bezpieczna dezynfekcja powietrza w obecności ludzi

Lampa bakteriobójcza przepływowa **NBVE-60 NL** marki **Ultraviol Polska** to urządzenie przeznaczone do **dezynfekcji powietrza** w pomieszczeniach wymagających podwyższonego reżimu higienicznego. W modelach przepływowych proces dezynfekcji odbywa się **wewnątrz szczelnej komory**, dzięki czemu promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę podczas prawidłowej pracy urządzenia.

To rozwiązanie jest szczególnie cenione w miejscach, gdzie ważna jest **ciągła poprawa jakości mikrobiologicznej powietrza** bez konieczności wyłączenia pomieszczenia z użytkowania – np. w gabinetach, poczekalniach, salach chorych czy laboratoriach. Wersja **NBVE-60 NL** wyposażona jest w **mechaniczny licznik czasu pracy**, co ułatwia kontrolę eksploatacji i planowanie wymiany promienników.

Najważniejsze zalety modelu NBVE-60 NL

- **Przepływowa dezynfekcja powietrza** – promieniowanie UV-C działa wewnątrz komory urządzenia.
- **Możliwość pracy w obecności ludzi** – przy prawidłowym montażu i użytkowaniu zgodnie z instrukcją producenta.
- **Licznik czasu pracy** – dokładność wskazań do 1 godziny.
- **Wymuszony obieg powietrza** – wentylator zwiększa skuteczność przepływu przez komorę dezynfekcyjną.
- **Zastosowanie profesjonalne** – placówki medyczne, kosmetyczne, edukacyjne i przemysłowe.
- **Montaż do instalacji elektrycznej** – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację.

Jak działa lampa przepływowa UV-C?

Powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia i kierowane przez komorę, w której pracują promienniki UV-C. W modelach z serii NBVE promieniowanie UV-C (wg opisu producenta: **253,7 nm**) oddziałuje na drobnoustroje znajdujące się w przepływającym powietrzu. Dzięki zamkniętej konstrukcji komory rozwiązanie może wspierać codzienną higienę powietrza w pomieszczeniach użytkowanych na bieżąco.

Ważne: lampa przepływowa UV-C wspiera procedury higieniczne i dekontaminację powietrza, ale nie zastępuje standardowych zasad sanitarnych, wentylacji oraz czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się NBVE-60 NL?

-
- gabinety lekarskie i zabiegowe,
 - przychodnie, POZ, izby przyjęć,
 - sale chorych, poczekalnie, laboratoria,
 - placówki kosmetyczne i rehabilitacyjne,
 - żłobki, przedszkola, szkoły,
 - pomieszczenia przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Dane techniczne

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 85 W
- **Element emitujący UV-C:** 2 x 30 W
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 132 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 25-50 m³/h
- **Zasięg działania lampy:** 10-20 m²
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 x 215 x 130 mm
- **Wymiary urządzenia:** 1190 x 215 x 145 mm
- **Masa:** 8,5 kg
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką)

Bezpieczeństwo i eksploatacja

Model NBVE-60 NL został zaprojektowany jako **lampa przepływowa**, czyli do pracy z promieniowaniem UV-C zamkniętym w komorze. Urządzenie posiada **atest PZH**. Dla zachowania bezpieczeństwa i skuteczności pracy należy stosować urządzenie zgodnie z instrukcją oraz regularnie kontrolować czas pracy promienników.

Dlaczego warto kupić ten model w Salemed.pl?

W Salemed.pl znajdziesz profesjonalne wyposażenie do dezynfekcji i higieny powietrza dla placówek medycznych, gabinetów i obiektów usługowych. Przy wyborze lampy przepływowej warto porównać nie tylko moc promienników, ale też sposób montażu, wydajność wentylatora oraz obecność licznika czasu pracy – to właśnie te parametry wpływają na wygodę codziennej eksploatacji i planowanie serwisu.

Zobacz również: [lampy bakteriobójcze przepływowe](#), [lampy serii NBVE i NBV](#) oraz [lampy przepływowe dwufunkcyjne](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.