

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lawka-obrotowa-na-wanne-turn360-z-oparciem-158-kg-p-3518.html>

Ławka obrotowa na wannę Turn360 z oparciem 158 kg



Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	323,15 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Turn360

Opis produktu

Ławka obrotowa na wannę Turn360 – gdy problemem jest obrót przy wchodzeniu do wanny

Ławka obrotowa na wannę Turn360 została zaprojektowana dla osób, którym trudność sprawia nie tylko stanie podczas kąpieli, ale przede wszystkim siadanie przy wannie, przełożenie nóg przez jej wysoki brzeg i obrócenie ciała w kierunku wnętrza. To regulowane **siedzisko obrotowe do wanny** z oparciem, bocznymi uchwytyami i mechanizmem blokującym, przeznaczone dla seniora, osoby z ograniczoną mobilnością lub użytkownika wymagającego dodatkowego podparcia podczas codziennej higieny.

W przypadku zwykłej ławki użytkownik siada na nieruchomym siedzisku, a następnie sam musi przesunąć ciało i wykonać obrót. Turn360 rozwiązuje ten problem inaczej: siedzisko można ustawić w stronę łazienki, zablokować na czas siadania, a następnie obrócić razem z użytkownikiem w kierunku wanny. Pomaga to ograniczyć potrzebę wykonywania gwałtownego skrętu tułowia oraz przestawiania stóp na mokrej powierzchni.

Produkt bywa potocznie określany jako **krzesło obrotowe do wanny, krzeselko wannowe, ławeczka nawannowa obrotowa lub siedzisko wannowe 360°**. Niezależnie od używanej nazwy jego najważniejszą przewagą jest możliwość zmiany kierunku ustawienia użytkownika bez konieczności obracania całego ciała na nieruchomej desce.

Najważniejsze przewagi modelu Turn360

- **pełny obrót siedziska o 360°** – umożliwia ustawienie użytkownika w kierunku łazienki albo wnętrza wanny,
- **blokada wybranej pozycji** – pozwala unieruchomić siedzisko przed siadaniem, podczas kąpieli i przed wstawianiem,
- **wyprofilowane oparcie** – zapewnia podparcie pleców w pozycji siedzącej,
- **dwa boczne uchwyty** – tworzą dodatkowe punkty podparcia dla rąk,
- **regulacja szerokości 74-79 cm** – umożliwia dopasowanie ramy do odpowiedniej wanny,
- **antypoślizgowe nasadki** – zwiększają powierzchnię styku z brzegami wanny i pomagają ograniczyć przesuwanie,
- **dodatkowa śruba rozporowa** – stabilizuje ramę względem wewnętrznej ścianki wanny,
- **aluminiowa konstrukcja** – łączy odporność na wilgoć z wagą wynoszącą 4,17 kg,
- **maksymalne obciążenie 158 kg** – większe niż w wielu prostych ławkach wannowych,
- **montaż bez trwałego mocowania do ściany** – ławkę można zdjąć z wanny po zakończeniu kąpieli.

Jak Turn360 ułatwia wejście do wanny i wyjście z niej?

Najtrudniejszym momentem korzystania z tradycyjnej wanny jest często jednoczesne utrzymanie równowagi, uniesienie nogi ponad brzeg i obrócenie tułowia. W Turn360 poszczególne etapy można rozdzielić:

1. siedzisko ustawia się w stronę użytkownika i blokuje,
2. użytkownik siada, korzystając w razie potrzeby z bocznych uchwytów,
3. po zwolnieniu blokady siedzisko obraca się w stronę wnętrza wanny,
4. po uzyskaniu właściwego ustawienia siedzisko ponownie się blokuje.

Dzięki temu użytkownik nie musi wykonywać całego manewru na stojąco ani przesuwac się po nieruchomej ławce. Nadal powinien jednak mieć możliwość stabilnego siedzenia i przełożenia nóg przez brzeg wanny samodzielnie lub przy pomocy opiekuna.

Siedzisko 360° z blokadą – najważniejsza różnica względem zwykłej ławki

Standardowa [ławka do wanny bez oparcia](#) zapewnia miejsce do siedzenia, ale pozostaje nieruchoma. Jeżeli potrzebujesz prostego stalowego siedziska na wannę, sprawdź także [stalową ławeczkę na wannę ŁNW 69 cm dla seniora](#) z udźwigiem do 120 kg. Model ŁNW będzie odpowiedni dla osoby, która samodzielnie utrzymuje pozycję siedzącą i nie potrzebuje oparcia ani mechanizmu obrotowego. Turn360 jest przeznaczona dla użytkownika, u którego właśnie obracanie się stanowi najtrudniejszą część transferu.

Turn360 jest przeznaczona dla użytkownika, u którego właśnie obracanie się stanowi najtrudniejszą część transferu. Mechanizm obrotowy pozwala skierować siedzisko na zewnątrz wanny, a następnie zmienić jego położenie bez przesuwania użytkownika po powierzchni siedziska.

Blokada nie jest dodatkiem służącym wyłącznie wygodzie. Jej zadaniem jest zatrzymanie siedziska w wybranym ustawieniu, aby nie obracało się swobodnie podczas siadania, kąpieli lub przygotowania do wstawiania.

Oparcie i dwa uchwyty boczne

Turn360 posiada wyprofilowane oparcie, które wspiera plecy podczas kąpieli. Jest to istotna różnica względem prostej deski nawannowej lub ławki bez oparcia, szczególnie gdy użytkownik szybciej się męczy albo potrzebuje wyraźnego punktu podparcia za plecami.

Po obu stronach siedziska znajdują się uchwyty. Pomagają one kontrolować ruch podczas siadania i wstawiania oraz stabilizować ułożenie rąk przed rozpoczęciem obrotu. Uchwyty ławki nie zastępują jednak prawidłowo dobranej poręczy ściennej, jeżeli użytkownik potrzebuje podparcia również podczas dojścia do wanny i poruszania się po łazience.

Informacje o rozmieszczeniu dodatkowych punktów podparcia znajdują się w poradniku [jak dobrać poręczę przy wannie i pod prysznicem](#).

Stabilizacja na wannie – nasadki i śruba rozporowa

Rama ławki opiera się na brzegach wanny za pomocą antypoślizgowych nasadek. Powinny one mieć pełny kontakt z równą i wystarczająco szeroką powierzchnią. Nie należy opierać konstrukcji jedynie na niewielkim fragmencie zaokrąglonego lub pochylonego brzegu.

Dodatkowym elementem modelu Turn360 jest śruba rozporowa z nasadką, którą dopasowuje się do wewnętrznej ścianki wanny. Pomaga ona ograniczyć boczne przemieszczanie się ramy podczas siadania i zmiany ustawienia użytkownika.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ławka została prawidłowo rozłożona, elementy regulacyjne są zablokowane, nasadki opierają się pełną powierzchnią, a śruba rozporowa została właściwie dopasowana.

Czy ławka Turn360 będzie pasowała do Twojej wanny?

Szerokość całkowitą konstrukcji można regulować w zakresie **74–79 cm**. Przed zakupem należy zmierzyć wannę dokładnie w miejscu planowanego ustawienia ławki, a następnie porównać wynik z zakresem regulacji produktu.

Nie wystarczy sprawdzić wyłącznie katalogowej długości lub szerokości całej wanny. O dopasowaniu decydują również:

- odległość pomiędzy miejscami podparcia ramy,
- szerokość górnych brzegów wanny,
- ich kształt i stopień zaokrąglenia,
- równość powierzchni,
- możliwość prawidłowego ustawienia śruby rozporowej.

Ławka nie jest odpowiednia do wanny, na której nasadki nie mogą oprzeć się w całości albo konstrukcja pozostaje przechylona po dopasowaniu szerokości.

Dla kogo przeznaczona jest obrotowa ławka do wanny?

Turn360 może być pomocna szczególnie dla:

- seniorów mających trudność z przekraczaniem wysokiego brzegu wanny,
- osób z ograniczoną ruchomością bioder, kolan lub tułowia,
- użytkowników o zmniejszonej sile kończyn dolnych,
- osób, które potrzebują kąpieli w pozycji siedzącej,
- użytkowników wymagających podparcia pleców i rąk,
- osób w okresie rekonwalescencji, jeżeli korzystanie z wanny zostało dopuszczone przez lekarza lub fizjoterapeutę,
- opiekunów pomagających bliskiej osobie w codziennych czynnościach higienicznych.

Produkt nie jest podnośnikiem wannowym ani urządzeniem przeznaczonym do samodzielnego unoszenia całkowicie niesprawnej osoby. Jeżeli użytkownik nie utrzymuje bezpiecznej pozycji siedzącej, wymaga pełnego transferu lub nie kontroluje ruchów tułowia, należy dobrać sprzęt odpowiedni do jego rzeczywistego poziomu sprawności.

Turn360 czy inny rodzaj ławki do wanny?

Najważniejszy problem użytkownika	Rekomendowane rozwiązanie
Trudność z obróceniem ciała po zajęciu pozycji siedzącej	Turn360 – siedzisko obrotowe 360° z blokadą
Potrzebne jest lekkie i proste siedzisko bez oparcia	KING BS-20 – ławka do wanny bez oparcia
Potrzebne jest niżej osadzone siedzisko i podparcie pleców	KING-BSB-20 – ławka wgłębna z oparciem
Potrzebne jest szerokie siedzisko, oparcie i pojedynczy uchwyt transferowy	BathTim – ławka z oparciem i uchwytem bocznym
Użytkownik może stać, ale problemem jest wyłącznie wysoki brzeg wanny	StepTim – regulowany stopień do wanny

Turn360 ma największy sens wtedy, gdy zwykła ławka zapewniałaby miejsce do siedzenia, ale nie rozwiązywałaby problemu zmiany kierunku ustawienia użytkownika. Więcej informacji o łączeniu siedzisk, poręcz i innych elementów wyposażenia znajduje się w poradniku [łazienka bez barier – dobór wyposażenia i punktów podparcia](#).

Dane techniczne ławki obrotowej Turn360

Producent	Timago
Model	Turn360
Rodzaj produktu	Obrotowa ławka na wannę z oparciem i uchwytami
Potoczne nazwy	Siedzisko obrotowe do wanny, krzesło wannowe, ławeczka nawannowa obrotowa
Zakres obrotu siedziska	360°
Blokada pozycji siedziska	Tak
Oparcie	Tak
Uchwyty boczne	Tak, dwa
Szerokość całkowita	74–79 cm
Długość całkowita	54 cm
Wysokość całkowita	50 cm
Wymiary siedziska	41 × 33 cm

Waga produktu	4,17 kg
Maksymalne obciążenie	158 kg
Materiał konstrukcji	Aluminium i PCV
Elementy stabilizujące	Nasadki antypoślizgowe i śruba rozporowa
Sposób montażu	Na brzegach wanny, bez trwałego mocowania do ściany
Wyrób medyczny	Tak
Oznaczenie CE	Tak

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą producenta.