

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/linka-2450mm-z-jednym-bloczkiem-p-1715.html>



Linka rehabilitacyjna KC-03-01 2450 mm z 1 bloczkiem do UGUL/PUR

Cena brutto **74,00 zł**

Cena netto **68,52 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-03-01**

Opis produktu

Linka KC-03-01 to element osprzętu UGUL/PUR do ćwiczeń samowspomaganych, prowadzący ruch przez bloczek dla płynniejszej pracy kończyny górnej.

Parametry w skrócie: Linka rehabilitacyjna KC-03-01 do ćwiczeń samowspomaganych w kabinach UGUL i PUR. Długość 2450 mm, 1 bloczek, regulacja długości oraz linka o średnicy 6 mm z wygodnym uchwytem z twprzywa. Umożliwia płynne prowadzenie ruchu i lepszą kontrolę podczas ćwiczeń.

Do czego służy linka z bloczkiem?

To element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu (UGUL/PUR), który pomaga wykonywać ruch w sposób kontrolowany i powtarzalny. Bloczek prowadzi linkę tak, aby praca była płynna, a pacjent łatwiej utrzymał prawidłowy tor ruchu – szczególnie w ćwiczeniach kończyny górnej.

Zastosowanie

- ćwiczenia samowspomagane (np. bark, łokieć, nadgarstek – zależnie od zestawu i ustawienia)
- kinezyterapia w gabinecie fizjoterapii oraz na sali rehabilitacyjnej
- praca z osprzętem kabin UGUL i PUR

Właściwości higieniczne i zalecenia dezynfekcji

Rączki linki KC-03 wykonane są z **tworzywa technicznego klasy premium**. W warunkach użytkowania w placówkach rehabilitacyjnych materiał ten spełnia podstawowe wymogi higieniczne przy zachowaniu prawidłowej procedury dezynfekcji.

Tworzywo jest materiałem nieporowatym, odpornym na wilgoć i typowe środki dezynfekujące. Nie wchłania wody ani wydzielin skórnych, co ułatwia utrzymanie higieny powierzchni. Materiał zachowuje swoje właściwości w kontakcie z preparatami alkoholowymi i na bazie związków czwartorzędowych, stosowanymi powszechnie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Zalecane środki i metody dezynfekcji

Do dezynfekcji rączek zaleca się preparaty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub biobójcze (kategoria PT2), przeznaczone do powierzchni medycznych. Skuteczne są środki na bazie alkoholu izopropylowego (IPA) lub etanolu w stężeniu 70%, a także preparaty zawierające czwartorzędowe sole amoniowe (QAC). Dobrym wyborem są gotowe chusteczki dezynfekujące do powierzchni medycznych, np. Sani-Cloth, Bacillol Tissues, Meliseptol Foam lub ich odpowiedniki. Dezynfekcję należy

przeprowadzać metodą przetarcia powierzchni, zapewniając wymagany czas kontaktu środka zgodnie z instrukcją preparatu (zazwyczaj 1-5 minut).

Dane techniczne

- **Model / nr katalogowy:** KC-03-01
- **Długość linki:** 2450 mm
- **Liczba blochków:** 1
- **Średnica linki:** 6 mm
- **Regulacja długości:** tak

1 blochek czy 2 blochki – co wybrać?

1 blochek sprawdzi się w podstawowych ćwiczeniach samowspomaganych, gdy potrzebujesz prostego prowadzenia linki. Jeżeli planujesz bardziej złożone prowadzenie toru ruchu lub inne ustawienie obciążenia, rozważ wariant z 2 blochkami.

Zobacz też: [osprzęt do kabin UGUL](#), [osprzęt do kabin PUR](#), [linka KC-03 z 2 blochkami \(2450 mm\)](#).

Wskazówki użytkowe

- Dobierz długość linki do konstrukcji kabiny i rodzaju ćwiczeń (w tej grupie występują też dłuższe warianty).
- Po treningu przetrzyj elementy z kurzu i potu (prosta konserwacja wydłuża żywotność).
- Jeśli kompletujesz zestaw – wybieraj osprzęt z tej samej grupy (UGUL/PUR), aby zachować spójność montażu.