

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nadmuchiwany-basen-do-mycia-glowy-p-698.html>

## Nadmuchiwany basen do mycia głowy



|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>85,00 zł</b>                                                                     |
| Cena netto       | <b>78,70 zł</b>                                                                     |
| Dostępność       |  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                   |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-YHWP02</b>                                                                |

### Opis produktu

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak trudno jest zadbać o higienę pacjenta obłożnie chorego. Ułatwiając Państwu to zadanie nasi producenci stworzyli **basen do mycia głowy**, który składa się z przenośnego nadmuchiwanego basenu do mycia głowy **z otworem odprowadzającym wodę** wykonany z PCV. Ze względu na ich niewielkie rozmiary basenik można z łatwością przenosić, dlatego nie ma potrzeby przenoszenia lub przewożenia pacjenta.

Podwójne komory powietrzna stanowią zabezpieczenie przed wylaniem wody i mydlin.

Przenośny prysznic do mycia głowy może być stosowany na łóżku lub krześle.

Zbiornik może pomieścić do 8 litrów wody.

Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy ograniczają się do pobytu w łóżku lub którzy mają trudności we wzięciu tradycyjnego prysznica.



Jego autem jest specjalne wycięcie na szyję aby zwiększyć komfort pacjenta.


Dodatkowo na dnie miski znajduje się specjalny korek, do którego podłączony jest



przewód  
odpływowy .

## Sposób użytkowania

- W pierwszej kolejności należy napompować basen przy użyciu pompki, a następnie zamknąć zawór odprowadzający wodę znajdujący się na dnie basenu. Basen można napełnić ciepłą wodą poniżej 50°C.

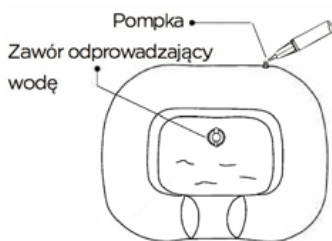

- Należy połączyć zbiornik na wodę z prysznicem



- Zbiornik należy wypełnić ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 50°C. Za pomocą uchwytu na zbiornik, zbiornik można zawiesić na stojaku lub ścianie.

- Należy przygotować wiadro, a następnie włożyć przewód odpływowy do środka. Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody, należy upewnić się, że przewód nie ma zagnieceń.



- Należy umieścić głowę pacjenta w wycięciu na szyję, a następnie odkręcić zawór prysznica, aby dostosować przepływ wody.



- Po umyciu głowy należy otworzyć zawór odprowadzający, aby woda spłynęła do wiadra przez przewód odprowadzający.



## Cechy basenu do mycia głowy:

- basenik specjalnie wyprofilowany,
- możliwość przenoszenia,
- basenik dmuchany,
- specjalne wycięcie na szyję,
- maksymalny komfort pacjenta i pielęgniarza.



#### Zestaw składa się z:

- basenu
- zbiornika na wodę
- prysznic
- przewodu odpływowego
- pompki
- uchwytu na zbiornik.

#### Dane techniczne:

- wymiary basenu: 65 x 50 x 25 cm
- pojemność basenu: 10 litrów
- pojemność zbiornika na wodę: 8 litrów

## Mycie samej głowy czy całego ciała pacjenta?

Nadmuchiwany basen jest przeznaczony do mycia włosów osoby siedzącej lub pozostającej w łóżku. Jeżeli potrzebne jest większe rozwiązanie umożliwiające mycie ciała pacjenta w pozycji leżącej, warto wybrać [pneumatyczną wannę EASY BATH do mycia osoby leżącej](#). Model posiada podwójne komory powietrzne, pompkę oraz odpływ ułatwiający usunięcie wody po zakończeniu mycia.

Basen rozwiązuje problem mycia włosów, ale nie służy do toalety pozostałych części ciała. Do codziennego mycia skóry można dobrać [wielorazową rękawicę myjącą dla pacjenta](#). Zaokrąglony model SM-EU-MDCF z dwóch warstw frotte pozostaje na dłoni opiekuna podczas użycia i może być stosowany z wodą oraz wybranym kosmetykiem myjącym.