

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/neuro-tim-timago-wozek-inwalidzki-z-zaglowkiem-i-odchylanym-oparciem-p-3527.html>



NEURO-TIM Timago – wózek inwalidzki z zagłówkiem i odchylanym oparciem

Cena brutto	1 330,00 zł
Cena netto	1 231,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NEURO-TIM

Opis produktu

NEURO-TIM – gdy standardowy wózek nie zapewnia podparcia głowy i pleców

Osoba korzystająca ze standardowego wózka z niskim oparciem może mieć trudność z utrzymaniem stabilnej pozycji, szybko męczyć się podczas siedzenia albo potrzebować okresowego odchylenia tułowia i zmiany ułożenia nóg. **NEURO-TIM marki Timago** został wyposażony w wydłużone, regulowane oparcie, zagłówek z poduszką oraz unoszone podnóżki z podparciem łydek.

To składany **aluminiowy wózek inwalidzki z zagłówkiem**, który może być prowadzony przez opiekuna, a przy odpowiedniej sprawności użytkownika również napędzany samodzielnie za pomocą ciągów tylnych kół. Oparcie reguluje się w zakresie **15-70°**, a podnóżki w zakresie **25-90°**. Dzięki temu ustawienie wózka można dopasować do przemieszczania, codziennych czynności oraz odpoczynku w pozycji odchylonej.

Najważniejsze funkcje wózka NEURO-TIM

- **wydłużone oparcie z regulacją 15-70°** – umożliwia zmianę pozycji użytkownika z bardziej pionowej na odchyloną;
- **zagłówek z miękką poduszką** – zapewnia dodatkowe podparcie głowy;
- **podnóżki regulowane 25-90°** – pozwalają zmienić kąt ułożenia kończyn dolnych;
- **podparcie łydek** – pomaga utrzymać nogi podczas korzystania z podnóżków w uniesionej pozycji;
- **hamulce przy rączkach** – pomagają opiekunowi kontrolować wózek podczas prowadzenia;
- **hamulec postojowy** – umożliwia unieruchomienie wózka podczas postoju;
- **duże tylne koła 22" z ciągami** – umożliwiają samodzielny napęd, jeżeli pozwala na to sprawność użytkownika;
- **szybkozłączka tylnych kół** – ułatwia demontaż kół przed transportem;
- **kółka antywywrotne** – ograniczają możliwość nadmiernego przechylenia konstrukcji do tyłu;
- **uchylne podłokietniki** – ułatwiają dostęp do siedziska podczas transferu boczego;
- **aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem** – zapewnia możliwość składania i dodatkowe usztywnienie konstrukcji;
- **dwie szerokości siedziska** – 46 lub 48 cm.

Dla kogo przeznaczony jest wózek z zagłówkiem NEURO-TIM?

NEURO-TIM może być rozważany dla dorosłej osoby z ograniczoną mobilnością, która podczas siedzenia potrzebuje wysokiego oparcia, podparcia głowy albo okresowej zmiany kąta ułożenia tułowia i nóg. Sprawdzi się także wtedy, gdy użytkownik wymaga pomocy opiekuna podczas przemieszczania, ale w miarę swoich możliwości może również korzystać z ciągów napędowych.

Wózki tego rodzaju są potocznie wyszukiwane jako:

- wózek inwalidzki z zagłówkiem,
- wózek z wysokim oparciem,
- wózek stabilizujący głowę i plecy,
- wózek z rozkładanym oparciem,
- wózek neurologiczny,
- fotel inwalidzki z podparciem głowy,
- wózek leżakowy.

NEURO-TIM nie rozkłada się jednak do całkowicie płaskiej pozycji. Oparcie można regulować w zakresie 15–70°, dlatego prawidłowo jest określać ten model jako wózek z pozycją odchyloną, a nie jako wózek do pełnej pozycji leżącej.

Regulowane oparcie 15–70° – zmiana pozycji bez przesadzania użytkownika

Ustawienie oparcia można dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika. Bardziej pionowa pozycja sprawdzi się podczas przemieszczania i wykonywania codziennych czynności. Większe odchylenie pozwala przyjąć pozycję wypoczynkową bez konieczności przenoszenia osoby na inne siedzisko.

Zmianę kąta należy wykonywać na unieruchomionym wózku, w kontrolowany sposób i zgodnie z instrukcją producenta. Przy mocniejszym odchyleniu szczególnie ważne jest prawidłowe ustawienie kółek antywywrotnych oraz pomoc opiekuna.

Podnóżki regulowane 25–90° i podparcie łydek

W zwykłym wózku nogi pozostają najczęściej w jednym położeniu. W NEURO-TIM kąt podnóżków można regulować w zakresie 25–90°. Pozwala to dopasować ułożenie kończyn dolnych do pozycji oparcia oraz potrzeb użytkownika.

Podparcie łydek pomaga utrzymać nogi podczas uniesienia podnóżków. Właściwy kąt powinien uwzględniać możliwości ruchowe użytkownika oraz zalecenia lekarza albo fizjoterapeuty.

Samodzielna jazda lub prowadzenie przez opiekuna

NEURO-TIM łączy dwa sposoby przemieszczania:

- **duże tylne koła z ciągami** pozwalają użytkownikowi napędzać wózek ręcznie, jeżeli ma wystarczającą sprawność kończyn górnych i kontrolę pozycji;
- **rączki z hamulcami dla osoby prowadzącej** umożliwiają opiekunowi pchanie i kontrolowanie wózka.

Przy znacznym odchyleniu oparcia, osłabionej kontroli tułowia lub braku możliwości bezpiecznego operowania ciągami wózek powinien być prowadzony przez opiekuna.

Jak wybrać szerokość siedziska 46 lub 48 cm?

Wózek NEURO-TIM występuje w dwóch wariantach. Pomiar należy wykonać w pozycji siedzącej, w odzieży najczęściej używanej podczas korzystania z wózka. Siedzisko powinno pozostawiać niewielki luz po obu stronach bioder, ale nie może być nadmiernie szerokie.

Szerokość siedziska	Głębokość siedziska	Szerokość całkowita
46 cm	42 cm	67 cm
48 cm	42 cm	69 cm

Przed zakupem należy zmierzyć również drzwi, korytarze, windę i miejsce przechowywania. Wariant z siedziskiem 46 cm ma 67 cm szerokości całkowitej, natomiast wariant 48 cm ma 69 cm szerokości całkowitej.

Składanie i transport wózka NEURO-TIM

Aluminiowa rama składa się na podwójnym krzyżaku, a tylne koła 22" można zdemontować za pomocą szybkozłączki. Po złożeniu wózek ma około **88 x 33 x 94 cm**. Przed zakupem warto porównać te wymiary z przestrzenią bagażową samochodu.

Wózek waży **17,5 kg**. Aluminiowa konstrukcja jest lżejsza od wielu stalowych wózków o podobnym wyposażeniu, jednak ze względu na wydłużone oparcie, zagłówek oraz regulowane podnóżki NEURO-TIM nie jest modelem ultralekkim. Jeżeli najważniejsza jest możliwie niska masa do częstego przenoszenia, warto sprawdzić także standardowe aluminiowe wózki bez wysokiego oparcia.

NEURO-TIM czy STABLE-TIM – najważniejsze różnice

Oba modele zapewniają podparcie głowy i pleców, ale nie są identyczne. Wybór powinien zależeć od potrzeb użytkownika, wymaganej szerokości siedziska oraz zakresu stabilizacji.

Cecha	NEURO-TIM	STABLE-TIM ALH 008
Regulacja oparcia	15-70°	0-90°
Szerokość siedziska	46 lub 48 cm	43, 46 lub 50 cm
Pas czteropunktowy	Nie jest wymieniony jako wyposażenie standardowe	Tak
Szybkozłączka tylnych kół	Tak	Nie
Główna przewaga	Regulacja oparcia i nóg oraz możliwość szybkiego demontażu tylnych kół	Większy zakres pozycjonowania i dodatkowa stabilizacja tułowia

NEURO-TIM ma największy sens, gdy potrzebne są zagłówek, pozycja odchylona, regulowane podnóżki i szybki demontaż tylnych kół. **STABLE-TIM** należy rozważyć, gdy użytkownik potrzebuje pasa czteropunktowego, oparcia regulowanego do 90° albo siedziska 43 lub 50 cm.

Kiedy NEURO-TIM nie będzie właściwym wyborem?

- Gdy potrzebna jest całkowicie płaska pozycja leżąca.
- Gdy użytkownik wymaga siedziska węższego niż 46 cm lub szerszego niż 48 cm.
- Gdy masa użytkownika przekracza 120 kg.
- Gdy potrzebny jest napęd elektryczny.
- Gdy konieczny jest napęd jednoręczny dla osoby z porażeniem jednostronnym.
- Gdy najważniejsza jest minimalna masa wózka do częstego przenoszenia.
- Gdy użytkownik potrzebuje indywidualnego systemu stabilizacji bocznej lub pasa tułowia, którego nie ma w wyposażeniu standardowym.

Dobór wózka dla osoby ze znacznym ograniczeniem kontroli tułowia, ryzykiem zsuwania się z siedziska lub zaawansowanymi zaburzeniami neurologicznymi powinien zostać skonsultowany z lekarzem, fizjoterapeutą albo terapeutą zajęciowym.

Dane techniczne NEURO-TIM

Producent	Timago
Model	NEURO-TIM
Rodzaj wózka	Ręczny wózek inwalidzki z podparciem głowy i pleców
Rama	Aluminiowa, składana, wzmocniona podwójnym krzyżakiem
Szerokość siedziska	46 lub 48 cm
Głębokość siedziska	42 cm
Wymiary siedziska	46 × 42 cm lub 48 × 42 cm
Szerokość całkowita	67 cm dla siedziska 46 cm / 69 cm dla siedziska 48 cm
Głębokość całkowita	113 cm
Wysokość całkowita	130 cm
Wysokość siedziska od podłoża	50 cm
Wysokość podłokietników od siedziska	24 cm
Regulacja kąta oparcia	15-70°
Zagłówek	Tak, z poduszką
Podłokietniki	Podnoszone
Regulacja kąta podnóżków	25-90°
Podparcie łydek	Tak
Koła tylne	22", z szybkozłączką i cięgami napędowymi
Koła przednie	8", z regulacją środka ciężkości i amortyzacją
Kółka antywywrotne	Tak
Hamulce dla opiekuna	Tak
Hamulec postojowy	Tak
Masa wózka	17,5 kg
Maksymalna masa użytkownika	120 kg
Wymiary po złożeniu	88 × 33 × 94 cm
Kolor ramy	Czarny
Numer katalogowy	NEURO-TIM
Kod EAN	5902983729037
Kod NFZ podany przez producenta	S.18.01.00
Klasyfikacja	Wyrób medyczny

Sprawdź właściwy rodzaj wózka inwalidzkiego

Porównaj ręczne wózki inwalidzkie

Jeżeli nie masz pewności, czy potrzebny jest model z zagłówkiem i regulowanym oparciem, sprawdź także standardowe wózki stalowe i aluminiowe, modele z hamulcami dla opiekuna oraz lekkie konstrukcje do częstego transportu.

[Zobacz wszystkie ręczne wózki inwalidzkie](#)

Potrzebujesz pasa czteropunktowego i większego zakresu odchylenia?

STABLE-TIM ma oparcie regulowane 0-90°, pas stabilizujący oraz siedziska 43, 46 i 50 cm. To rozwiązanie do rozważenia, gdy użytkownik potrzebuje większego zakresu pozycjonowania niż w modelu NEURO-TIM.

[Porównaj NEURO-TIM z wózkiem STABLE-TIM](#)

NEURO-TIM jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Informacje na stronie nie zastępują indywidualnego doboru sprzętu do stanu, budowy ciała i możliwości użytkownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 46 cm , 48 cm