

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nierdzewny-regal-medyczny-do-120-kg-p-3432.html>



Nierdzewny regał medyczny do 120 kg

Cena brutto	4 169,00 zł
Cena netto	3 389,43 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-02/1200x500
Kod producenta	TMBY-RM-02

Opis produktu

Nierdzewny regał medyczny 4-półkowy perforowany

Niezawodny, wytrzymały regał magazynowy zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach higieny i funkcjonalności. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, jest odporny na korozję, wilgoć i agresywne środki dezynfekcyjne. Perforowane półki zapewniają optymalną cyrkulację powietrza, co czyni go idealnym wyborem do sterylizatorni i innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. To wyposażenie medyczne, które łączy solidność z łatwością pielęgnacji, gwarantując bezpieczne przechowywanie sprzętu, narzędzi czy materiałów eksploatacyjnych.

Kluczowe korzyści

- **Higiena i odporność:** Wykonanie ze stali kwasoodpornej oraz perforowane półki gwarantują łatwe czyszczenie, dezynfekcję i swobodny przepływ powietrza, eliminując ryzyko gromadzenia się wilgoci. To klucz do utrzymania sterylności w środowisku medycznym.
- **Wytrzymałość i stabilność:** Solidna konstrukcja i nośność do 120 kg pozwalają na bezpieczne przechowywanie ciężkiego sprzętu. Regulowane stopki umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie na każdej, nawet nierównej, powierzchni, zapewniając pełną stabilność.
- **Długotrwała inwestycja:** Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości i odporności na czynniki zewnętrzne, metalowy regał magazynowy posłuży przez wiele lat, minimalizując potrzebę częstych wymian i napraw. To oszczędność i pewność działania w każdym momencie.

Dla kogo jest ten regał?

Ten regał nierdzewny jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej jakości wyposażenia szpitalnego. Idealnie sprawdzi się w:

- Szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich
- Laboratoriach i aptekach
- Sterylizatorniach i salach operacyjnych
- Magazynach medycznych

Kto nie powinien go używać?

- Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa.

- Podmioty, które planują obciążać go powyżej dopuszczalnej nośności (120 kg łącznie, 30 kg na półkę).
- Miejsca, w których regał mógłby być narażony na czynniki trwale barwiące (np. jodyna).

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

1. Maksymalne obciążenie: Nie przekraczaj 30 kg na każdą z półek ani 120 kg całkowitego obciążenia regału.
2. Prawidłowe użytkowanie: Regał należy przemieszczać, unosząc go za ramy boczne. Przemieszczanie poprzez ciągnięcie lub pchanie za półki jest niedozwolone.
3. Warunki otoczenia: Użytkuj regał w temperaturze od +10 do +40°C i wilgotności względnej 30-75%.
4. Przeglądy: Regularne przeglądy (minimum raz na rok) są niezbędne do weryfikacji stanu technicznego regału. Zapewnia to bezpieczeństwo i utrzymanie gwarancji.

Pielęgnacja

Regularna pielęgnacja jest kluczowa dla zachowania właściwości stali kwasoodpornej.

- Czyszczenie: Do mycia używaj czystej, miękkiej i wilgotnej ściereczki lub gąbki. Nie stosuj sterylizacji parowej ani wodnej.
- Konserwacja: Po każdym myciu i dezynfekcji należy przeprowadzić konserwację. W przypadku rdzawego nalotu użyj specjalistycznych preparatów do renowacji powierzchni ze stali kwasoodpornej. Po czyszczeniu, powierzchnię należy zabezpieczyć.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1200 x 500 x 1800 mm
Materiał	Stal kwasoodporna 0H18N9
Liczba półek	4 (perforowane)
Maksymalne obciążenie półki	30 kg
Maksymalne obciążenie regału	120 kg
Ciężar własny	25 kg
Montaż	Skręcany (samodzielny)
Regulacja	Stopki poziomujące, opcjonalnie regulacja wysokości półek
Kotwiczenie	opcjonalnie za dopłatą
Warunki otoczenia	Temperatura: +10 do +40°C, Wilgotność: 30-75%
Gwarancja	12 miesięcy

FAQ (Często zadawane pytania)

1. Czy regał jest dostarczany w całości?

Nie, metalowy regał magazynowy jest przeznaczony do samodzielnego montażu. W zestawie znajdziesz wszystkie niezbędne elementy oraz instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces składania.

2. Czy mogę zmienić wysokość półek?

Standardowo wysokość półek jest stała. Opcja regulacji wysokości półek jest dostępna opcjonalnie.

3. Jakie narzędzia są potrzebne do montażu?

Do montażu regału potrzebny jest jedynie klucz imbusowy 5 mm, który nie jest częścią zestawu.

4. Czy regał można używać w wilgotnym środowisku?

Tak, regał ze stali kwasoodpornej został zaprojektowany z myślą o środowiskach o podwyższonej wilgotności, takich jak sterylizatornie. Jego materiał jest odporny na korozję, a perforowane półki zapewniają optymalny przepływ powietrza.

5. Jak często należy dokonywać przeglądów?

Przeglądy okresowe należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i stabilność konstrukcji.

Zbuduj swój idealny regał magazynowy. Dodaj do koszyka i usprawnij organizację w swojej placówce!

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub moką gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOSEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodes® Extra oraz One -
Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu			

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak