

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-nogi-p-2178.html>

## Skórzany pas unieruchamiający na nogi (kostki) do łóżka szpitalnego



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>429,00 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>348,78 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Dostępność |  |
|------------|--|



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | <b>SM-RH-PUNN</b> |
|------------------|-------------------|

### Opis produktu

**Skórzany pas unieruchamiający na nogi (kostki) do łóżka szpitalnego** służy do czasowego ograniczenia ruchów kończyn dolnych pacjenta poprzez stabilne mocowanie do ramy łóżka. Jest stosowany jako element systemu pasów zabezpieczających w opiece szpitalnej oraz długoterminowej – zawsze zgodnie z procedurami placówki.

**Skrót parametrów:** pas główny ma **125 cm** długości i **6,5 cm** szerokości. Obejma kostki ma **37 cm** długości i regulację obwodu **16-32 cm**. Paski mocujące mają **3,5 cm** szerokości, a całkowita długość zestawu z paskami wynosi **135-165 cm** (zależnie od ustawienia).

### Zastosowanie

- stabilizacja nóg (kostek) pacjenta w łóżku szpitalnym,
- wsparcie bezpieczeństwa w opiece szpitalnej i długoterminowej,
- użycie przez personel/opiekuna zgodnie z procedurami oddziału i obowiązującymi przepisami.

### Najważniejsze cechy

- wykonanie ze skóry naturalnej,
- regulowane obejmy kostek (16-32 cm),
- **filc od spodu** dla zwiększenia komfortu i ograniczenia ryzyka otarć,
- paski umożliwiające stabilne zamocowanie do konstrukcji łóżka,
- metalowe sprzączki ułatwiające dopasowanie i trwałe zapięcie,
- czytelna specyfikacja ułatwiająca dobór do łóżka i procedur placówki.

### Dane techniczne

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Długość pasa głównego</b>       | 125 cm                            |
| <b>Szerokość pasa głównego</b>     | 6,5 cm                            |
| <b>Długość obejmy</b>              | 37 cm (regulacja obwodu 16-32 cm) |
| <b>Szerokość pasków mocujących</b> | 3,5 cm                            |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Minimalna długość z paskami  | 135 cm |
| Maksymalna długość z paskami | 165 cm |

## Montaż i dopasowanie

1. Umieść pas w docelowym miejscu i zapewnij dostęp do ramy łóżka.
2. Przypnij paski mocujące do konstrukcji łóżka tak, aby pas był stabilny i nie przemieszczał się w żadnym kierunku.
3. Załóż obejmę na kostki i wyreguluj sprzączki w zakresie **16-32 cm**.
4. Sprawdź, czy pas ogranicza niekontrolowane ruchy, ale **nie powoduje nadmiernego ucisku** ani zaburzeń krążenia.
5. Kontroluj dopasowanie zgodnie z procedurą placówki (regularne kontrole stanu skóry i komfortu pacjenta).

## Konserwacja i higiena

- czyścić delikatnie, zgodnie z zasadami pielęgnacji wyrobów skórzanych,
- stosować wyłącznie środki dopuszczone do użytku w placówce i zgodne z wewnętrzną procedurą dezynfekcji,
- unikać przemaczania, suszenia na grzejniku oraz w pełnym słońcu,
- przed każdym użyciem skontrolować stan pasa i elementów mocujących.

**Ważne:** produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel i zgodnie z procedurami placówki. Zakres zabezpieczenia pacjenta może wymagać zastosowania dodatkowych elementów systemu (np. pas na rękę, pas na klatkę piersiową, pas na uda) w zależności od potrzeb i standardów oddziału.

## Uzupełnij system pasów

Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające pacjenta](#). Jeśli kompletujesz zestaw do łóżka, sprawdź także: [pas unieruchamiający na rękę](#), [pas unieruchamiający na klatkę piersiową](#) oraz [pas unieruchamiający na uda](#). Jeżeli potrzebujesz stabilizacji tylko jednej kończyny, zobacz też: [pas unieruchamiający na kostkę \(1 szt.\)](#).

**Cena obejmuje wyłącznie pas unieruchamiający na nogi (kostki).**