

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-na-rece-p-761.html>

Skórzany pas unieruchamiający na nadgarstki do łóżka szpitalnego



Cena brutto **429,00 zł**

Cena netto **348,78 zł**

Dostępność



Numer katalogowy

SM-RH-PUNR

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na nadgarstki do łóżka szpitalnego służy do stabilizacji rąk pacjenta poprzez bezpieczne przypięcie do ramy łóżka. Jest stosowany w placówkach medycznych jako element systemu pasów zabezpieczających, gdy konieczne jest ograniczenie niekontrolowanych ruchów pacjenta.

Komfort użytkowania: od spodu pas posiada **warstwę filcu**, która pomaga ograniczyć ryzyko otarć i podnosi komfort kontaktu ze skórą (przy stosowaniu zgodnym z procedurami placówki).

Skrót parametrów: pas główny ma **125 cm** długości i **6,5 cm** szerokości. Obejma nadgarstka ma **37 cm** długości i regulację obwodu **16-32 cm**. Paski mocujące mają **3,5 cm** szerokości, a całkowita długość zestawu z paskami wynosi **135-165 cm** (zależnie od ustawienia).

Zastosowanie

- stabilizacja nadgarstków pacjenta w łóżku szpitalnym,
- wsparcie bezpieczeństwa w opiece szpitalnej i długoterminowej,
- użycie przez personel zgodnie z procedurami oddziału oraz obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze cechy

- wykonanie ze skóry naturalnej,
- **filc od spodu** dla zwiększenia komfortu i ograniczenia ryzyka otarć,
- regulowane obejmy nadgarstków (16-32 cm),
- paski do stabilnego zamocowania do konstrukcji łóżka,
- metalowe sprzączki zapewniające trwałe dopasowanie,
- czytelna specyfikacja ułatwiająca dobór do łóżka i procedur placówki.

Dane techniczne

Długość pasa głównego	125 cm
Szerokość pasa głównego	6,5 cm
Długość obejmy nadgarstka	37 cm (regulacja obwodu 16-32 cm)

Szerokość pasków mocujących	3,5 cm
Minimalna długość z paskami	135 cm
Maksymalna długość z paskami	165 cm

Montaż i dopasowanie

1. Umieść pas w docelowym miejscu i zapewnij dostęp do ramy łóżka.
2. Przypnij paski mocujące do konstrukcji łóżka tak, aby pas był stabilny i nie przemieszczał się w żadnym kierunku.
3. Załóż obejmę na nadgarstki i wyreguluj sprzączki w zakresie **16-32 cm**.
4. Sprawdź, czy pas ogranicza niekontrolowane ruchy, ale **nie powoduje nadmiernego ucisku** ani zaburzeń krążenia.
5. Kontroluj dopasowanie zgodnie z procedurą placówki (regularne kontrole stanu skóry, komfortu pacjenta i ułożenia filcu).

Konserwacja i higiena

- czyścić delikatnie, zgodnie z zasadami pielęgnacji wyrobów skórzanych (np. przetarcie miękką ściereczką),
- warstwę filcu od spodu czyścić zgodnie z procedurą oddziału (bez agresywnego tarcia i przemaczania),
- unikać suszenia na grzejniku oraz w pełnym słońcu,
- stosować środki dopuszczone do użytku w placówce (zgodnie z wewnętrzną procedurą dezynfekcji i pielęgnacji).

Ważne: produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel i zgodnie z procedurami placówki. Zakres zabezpieczenia pacjenta może wymagać zastosowania dodatkowych elementów systemu (np. pas na nogi, pas na klatkę piersiową, pas na uda) w zależności od potrzeb i standardów oddziału.

Uzupełnij system pasów

Zobacz kategorię: [pasy unieruchamiające pacjenta](#). Jeśli kompletujesz zestaw do łóżka, sprawdź także: [pas unieruchamiający na nogi](#), [pas unieruchamiający na klatkę piersiową](#) oraz [pas unieruchamiający na uda](#).

Cena obejmuje wyłącznie pas unieruchamiający na nadgarstki.