

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/podporka-czterokolowa-pedro-p-3374.html>



Podpórka czterokołowa PEDRO

Cena brutto	485,00 zł
Cena netto	449,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-PEDRO

Opis produktu

Podpórka czterokołowa PEDRO - lekka podpórka aluminiowa do użytku domowego

Profesjonalna podpórka czterokołowa PEDRO to nowoczesny sprzęt pomocniczy przeznaczony dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które wymagają stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia w warunkach domowych lub w placówkach opieki. Dzięki lekkiej, anodyzowanej ramie aluminiowej, funkcjonalnym hamulcom z blokadą postojową oraz praktycznej torbie z tacką model PEDRO pomaga odzyskać samodzielność, poczucie bezpieczeństwa i komfort codziennego przemieszczania się. To jedno z najczęściej wybieranych podpórek dla seniorów szukających solidnego, a zarazem mobilnego wsparcia.

Najważniejsze zalety

Stabilność i pewne podparcie - cztery koła zapewniają szeroką podstawę oraz płynny, bezpieczny ruch po gładkich powierzchniach wewnętrznych.

Lekka konstrukcja - anodyzowana rama sprawia, że podpórka aluminiowa jest łatwa do przesuwania i manewrowania nawet dla osób z ograniczoną siłą rąk.

Hamulce z funkcją postojową - możliwość natychmiastowego zatrzymania oraz zablokowania podpórki dla bezpiecznego stania lub transferu.

Torba z tacką - wygodne przewożenie drobnych przedmiotów domowych; tacka przydaje się np. do przenoszenia posiłków lub leków.

Regulowana wysokość uchwyty - dopasowanie do wzrostu użytkownika poprawia ergonomię i zmniejsza obciążenie barków.

Kompaktowe wymiary - łatwe manewrowanie w korytarzach, między meblami i w łazience.

Kluczowe cechy konstrukcyjne

Anodyzowana aluminiowa rama

Lekka, odporna na korozję i łatwa w utrzymaniu czystości. Zielone wykończenie dodaje widoczności w przestrzeni domowej.

Hamulce ręczne z blokadą postojową

Użytkownik może ścisnąć klamki, aby zwolnić prędkość, lub nacisnąć/opuścić je (w zależności od mechanizmu) w dół, aby

zablokować koła podczas odpoczynku, siadania czy wstawania.

Torba materiałowa + zdejmowana tacka.

Przenoszenie lekkich zakupów, dokumentów, butelki wody czy leków. Tacka ułatwia transport posiłków między kuchnią a pokojem.

Koła pełne 5"

Tylne koła pełne z hamulcami zapewniają kontrolę, przednie koła obrotowe (również pełne) umożliwiają łatwe skręcanie w wąskich przestrzeniach. Brak konieczności pompowania.

Regulowany, miękki uchwyt

Miękkie wykończenie poprawia komfort chwytu i redukuje ucisk dłoni podczas dłuższego użytkowania.

Komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu

Podczas rehabilitacji lub w późniejszym wieku równowaga i pewność kroku często są ograniczone. Podpórka czterokołowa PEDRO zwiększa stabilność, przenosząc część ciężaru ciała na ramę. Pozwala użytkownikowi poruszać się bardziej naturalnie niż przy chodziku przestawnym, a koła usprawniają ruch do przodu bez konieczności podnoszenia sprzętu. Hamulce z funkcją postojową pomagają zapobiec niekontrolowanemu przesunięciu, co szczególnie ważne jest przy siadaniu na krzesło lub podnoszeniu się z łóżka. Dzięki temu podpórka aluminiowa PEDRO może stanowić istotny element procesu powrotu do aktywności.

Dla kogo polecana?

- Seniorzy mający trudności z utrzymaniem równowagi (popularny wybór w kategorii podpórki dla seniorów).
- Osoby po urazach kończyn dolnych lub zabiegach ortopedycznych, które stopniowo wracają do chodzenia.
- Pacjenci z osłabieniem mięśniowym, chorobami neurologicznymi wpływającymi na stabilność lub koordynację.
- Użytkownicy wymagający asekuracji w poruszaniu się po domu, ośrodku rehabilitacyjnym lub domu opieki.

Uwaga: Model PEDRO jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.

Jak dobrać wysokość uchwytu?

- Załóż wygodne, codzienne obuwie.
- Stań prosto wewnątrz lub tuż za podpórką, ramiona rozluźnione.
- Ustaw uchwyty tak, aby znajdowały się na wysokości nadgarstków, gdy ręce swobodnie opadają wzdłuż ciała.
- Po chwyceniu rączek łokcie powinny być lekko zgięte (ok. 15-20°) – to wspiera ergonomię i kontrolę.

Regulacja w modelu PEDRO: 89-94 cm (od podłoża do uchwytów, w zależności od sposobu pomiaru producenta).

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdź działanie hamulców.
- Zawsze blokuj hamulce postojowe, zanim oprzesz się mocniej na podpórce lub wykonasz transfer (np. siadanie na krzesło).
- Nie przekraczaj dopuszczalnego maks. obciążenia torby i tacki: 5 kg.
- Nie używaj podpórki jako siedziska (model PEDRO nie jest wyposażony w siedzisko). Jeśli potrzebujesz rollatora z siedziskiem, wybierz odpowiedni model z naszej oferty podpórek dla seniorów.
- Używaj wyłącznie na równych, suchych, wewnętrznych powierzchniach.

Dane techniczne

- Szerokość całkowita: 60 cm
- Głębokość całkowita: 66 cm
- Wymiary tacki: 38 x 29 cm
- Regulacja wysokości: 89-94 cm
- Waga: 5,6 kg
- Maks. waga użytkownika: 115 kg
- Maks. obciążenie torby i tacki: 5 kg
- Kolor ramy: zielony

Co wyróżnia podpórkę PEDRO na tle innych modeli?

-
- Bardzo korzystny stosunek masy do nośności (użytkownik do 115 kg przy wadze własnej 5,6 kg).
 - Zintegrowana torba i tacka – rzadziej spotykane w lekkich modelach do wnętrza.
 - Intuicyjne hamulce z możliwością blokady, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa u osób starszych.
 - Kolorystycznie wyróżniająca się rama ułatwia lokalizację sprzętu w domu.

Zawartość zestawu

- Podpórka czterokołowa PEDRO (rama + koła + system hamulcowy).
- Torba materiałowa montowana na ramie.
- Tacka (demontowalna / zdejmowana) – pasuje do torby.
- Instrukcja użytkowania producenta.

Konserwacja i czyszczenie

- Czyść ramę miękką, wilgotną ściereczką; unikaj agresywnych detergentów.
- Sprawdzaj okresowo śruby i połączenia – w razie luzów dokręć zgodnie z instrukcją.
- Kontroluj zużycie powierzchni kół; wymień, gdy bieżnik lub mocowanie są uszkodzone.

Informacja medyczna / zastrzeżenie

Podpórka czterokołowa PEDRO jest sprzętem pomocniczym i nie zastępuje profesjonalnej oceny medycznej. W razie wątpliwości co do doboru lub sposobu użytkowania skonsultuj się z lekarzem, fizjoterapeutą lub personelem sklepu medycznego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.