

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-z-bluetooth-p-2885.html>



Pulsoksymetr napalcowy BERRY BM1000C z Bluetooth – SpO₂ i tętno

Cena brutto	70,00 zł
Cena netto	64,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-PN-TGO-BM1000C
Kod producenta	BM1000C

Opis produktu

Pulsoksymetr BERRY BM1000C Bluetooth – SpO₂, tętno i historia pomiarów w aplikacji

BERRY BM1000C to pulsoksymetr napalcowy z Bluetooth dla osób, które chcą nie tylko szybko sprawdzić **satyrację SpO₂** i **tętno**, ale też wygodnie porównywać wyniki w czasie. W odróżnieniu od zwykłych pulsoksymetrów bez łączności, model BM1000C może współpracować z aplikacją OXICARE/OXYCARE, dzięki czemu łatwiej prowadzić historię pomiarów bez ręcznego notowania.

To praktyczny oksymetr na palec do domu, opieki nad seniorem, kontroli podstawowych parametrów oraz szybkiego pomiaru w gabinecie. Wynik można odczytać bezpośrednio na ekranie OLED, a funkcja Bluetooth daje dodatkową możliwość zapisu i porównywania pomiarów w telefonie.

Dlaczego BERRY BM1000C wyróżnia się na tle zwykłych pulsoksymetrów?

Podstawowy pulsoksymetr pokazuje wynik tylko w chwili pomiaru. **BERRY BM1000C daje więcej**, ponieważ łączy szybki odczyt na ekranie z możliwością prowadzenia historii wyników w aplikacji. To ważne szczególnie wtedy, gdy pomiary wykonujesz regularnie, opiekujesz się seniorem albo chcesz porównywać odczyty wykonane w podobnych warunkach.

- **Bluetooth i aplikacja** – wygodniejszy zapis oraz przegląd historii pomiarów.
- **Pomiar SpO₂** – szybka kontrola poziomu saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem.
- **Pomiar tętna** – odczyt pulsu w uderzeniach na minutę.
- **Ekran OLED** – wynik widoczny bezpośrednio na urządzeniu, również bez telefonu.
- **Wygoda dla opiekuna** – łatwiejsze porównywanie wyników bez ręcznego przepisywania.
- **Rozsądna cena** – funkcja Bluetooth bez konieczności wyboru droższego modelu profesjonalnego.

Bluetooth i aplikacja OXICARE/OXYCARE – po co to w pulsoksymetrze?

Łączność Bluetooth nie jest tu dodatkiem „na pokaz”. Jej główną zaletą jest możliwość wygodniejszego zapisywania i porównywania wyników. Do współpracy z telefonem można używać aplikacji **OXICARE** lub **OXYCARE**, zależnie od systemu i dostępnej wersji aplikacji.

Dzięki aplikacji łatwiej sprawdzić, jak zmieniały się pomiary w czasie. To przydatne wtedy, gdy chcesz porównać kilka wyników wykonanych o podobnej porze, po krótkim odpoczynku i w zbliżonych warunkach. Taka historia jest wygodniejsza niż pojedynczy odczyt zapamiętany albo zapisany ręcznie.

Dla kogo sprawdzi się pulsoksymetr z Bluetooth?

- **Dla seniora** – szybki odczyt na ekranie i możliwość kontroli historii przez opiekuna.
- **Dla opiekuna** – łatwiejsze porównywanie wyników bez ręcznego notowania każdego pomiaru.
- **Do domu** – jako element podstawowego zestawu obok ciśnieniomierza, termometru i inhalatora.
- **Dla osób aktywnych** – do okresowej kontroli tętna i saturacji po odpoczynku.
- **Do gabinetu** – jako prosty pulsoksymetr do szybkiego pomiaru kontrolnego.

Jak prawidłowo wykonać pomiar SpO₂ i tętna?

1. Usiądź spokojnie i oprzyj rękę, aby ograniczyć ruch podczas pomiaru.
2. Upewnij się, że palec jest ciepły, suchy i bez ciemnego lakieru lub sztucznego paznokcia.
3. Załóż pulsoksymetr na palec wskazujący albo środkowy.
4. Poczekaj kilka sekund, aż wynik na ekranie się ustabilizuje.
5. Jeżeli wynik wydaje się nietypowy, powtórz pomiar po chwili w spokojnych warunkach.

Na jakość pomiaru mogą wpływać m.in. zimne dłonie, ruch palca, słabsze ukrwienie, mocne światło, nieprawidłowe założenie klipsa, lakier do paznokci lub sztuczne paznokcie. Dla lepszej powtarzalności warto porównywać pomiary wykonane w podobnych warunkach.

Jak rozumieć wynik saturacji SpO₂?

U wielu zdrowych osób wartości SpO₂ mieszczą się zwykle w zakresie około **95-100%**. Sam wynik nie powinien być jednak interpretowany w oderwaniu od samopoczucia, objawów, wieku, chorób przewlekłych i zaleceń personelu medycznego. Pulsoksymetr jest urządzeniem pomocniczym do kontroli parametrów i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

BERRY BM1000C czy HoMedics PX-101 – który pulsoksymetr wybrać?

BERRY BM1000C będzie lepszym wyborem, jeśli zależy Ci na funkcji Bluetooth, aplikacji i możliwości zapisywania historii pomiarów w telefonie. To praktyczna opcja dla osób, które wykonują pomiary regularnie i chcą łatwiej porównywać wyniki bez ręcznego notowania.

Jeżeli natomiast szukasz markowego pulsoksymetru HoMedics z pomiarem indeksu perfuzji PI, sprawdź również [pulsoksymetr HoMedics PX-101](#). Dzięki temu możesz dobrać urządzenie do sposobu użytkowania: BERRY BM1000C do aplikacji i historii pomiarów, HoMedics PX-101 do pomiaru SpO₂, tętna i PI.

Dane techniczne BERRY BM1000C

Model	BERRY BM1000C
Typ urządzenia	pulsoksymetr napalcowy / oksymetr na palec
Mierzone parametry	saturacja SpO ₂ , tętno
Łączność	Bluetooth
Aplikacja	OXICARE / OXYCARE
Wyświetlacz	OLED
Zakres SpO₂	35-100%
Zakres tętna	25-250 bpm
Wymiary	ok. 58 × 34 × 30 mm
Waga	ok. 50 g z bateriami
Zasilanie	2 × bateria AAA 1,5 V

Zawartość opakowania

- pulsoksymetr BERRY BM1000C,
- smycz,
- instrukcja obsługi.

Dlaczego warto kupić w SaleMED?

- kupujesz w specjalistycznym sklepie ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym,
- produkt jest dostępny z magazynu,
- otrzymujesz paragon lub fakturę VAT,
- możesz dobrać także inne urządzenia do domowej kontroli parametrów,
- w jednej kategorii porównasz pulsoksymetry z różnymi funkcjami.

Dobierz komplet do domowej kontroli parametrów

Jeśli kompletujesz praktyczny zestaw do podstawowej kontroli zdrowia w domu, zobacz także: [pulsoksymetry napalcowe](#), [ciśnieniomierze elektroniczne](#), [termometry elektroniczne](#) oraz [inhalatory](#).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wyniki pomiaru interpretuj w kontekście objawów, stanu zdrowia i zaleceń personelu medycznego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy BERRY BM1000C zapisuje pomiary?

Tak. Po połączeniu przez Bluetooth z aplikacją OXICARE/OXYCARE można wygodniej przeglądać i porównywać historię wyników. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które wykonują pomiary regularnie.

Czy pulsoksymetr BERRY BM1000C działa bez telefonu?

Tak. Wynik SpO₂ i tętna można odczytać bezpośrednio na ekranie OLED urządzenia. Telefon i aplikacja są potrzebne wtedy, gdy chcesz korzystać z funkcji zapisu oraz historii pomiarów.

Jaka aplikacja współpracuje z BERRY BM1000C?

Do obsługi historii pomiarów stosowana jest aplikacja OXICARE/OXYCARE. Dostępność konkretnej wersji aplikacji może zależeć od systemu telefonu i aktualnej wersji sklepu z aplikacjami.

Czym BERRY BM1000C różni się od zwykłego pulsoksymetru bez Bluetooth?

Zwykły pulsoksymetr pokazuje wynik tylko w chwili pomiaru. BERRY BM1000C dzięki Bluetooth może współpracować z aplikacją, co ułatwia zapisywanie i porównywanie wyników w czasie.

Czy BERRY BM1000C nadaje się dla seniora?

Tak. Urządzenie jest małe, lekkie i pokazuje wynik bezpośrednio na ekranie. Funkcja aplikacji może być dodatkową pomocą dla opiekuna, który chce porównywać wyniki pomiarów w czasie.

Dlaczego wynik pulsoksymetru może się zmieniać?

Najczęstsze przyczyny to ruch ręki, zimny palec, słabe ukrwienie, lakier na paznokciach, sztuczne paznokcie albo zbyt płytko wsunięty palec. Dla lepszej powtarzalności warto odczekać chwilę i powtórzyć pomiar.

Czy pulsoksymetr zastępuje konsultację lekarską?

Nie. Pulsoksymetr jest narzędziem pomocniczym do kontroli parametrów. Nietypowe wyniki lub niepokojące objawy należy skonsultować z lekarzem albo personelem medycznym.