

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rekawica-ochronna-p-1225.html>



## Rękawica ochronna Salvacel dla pacjenta – przeciw drapaniu

Cena brutto **77,00 zł**

Cena netto **71,30 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-TGO-PS-SVC-2500/2510**

### Opis produktu

**Rękawica ochronna Salvacel SVC 2500 / SVC 2510 pomaga zabezpieczyć dłoń pacjenta przed drapaniem, rozdrapywaniem ran, samouszkodzeniem oraz niekontrolowanym chwytaniem.** Miękki welur i oddychająca siateczka osłaniają dłoń, natomiast usztywniony panel ogranicza możliwość pełnego zaciśnięcia palców. Rękawica jest dostępna w rozmiarach M i L, pasuje na prawą i lewą dłoń i posiada pasek umożliwiający dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z instrukcją producenta.

**Cena dotyczy 1 sztuki rękawicy z paskiem.** Jeżeli ochrony wymagają obie dłonie pacjenta, należy zamówić 2 sztuki.

- pomaga ograniczyć drapanie skóry i rozdrapywanie ran,
- usztywniony panel utrudnia chwytanie przedmiotów,
- zabezpiecza dłoń miękkim welurem i oddychającą siateczką,
- regulowane zapięcie na rzep ułatwia dopasowanie do nadgarstka,
- ten sam model można stosować na prawą lub lewą dłoń,
- do wyboru rozmiar M – SVC 2500 lub L – SVC 2510.



## Rękawica zabezpieczająca dłoń pacjenta przed drapaniem

Salvacele jest przeznaczona dla pacjentów wymagających zwiększonego nadzoru nad ruchami dłoni. Może być stosowana, gdy pacjent drapie skórę, rozdrapuje ranę, próbuje chwytać przedmioty albo manipuluje dłonią przy opatrunku. Rękawica tworzy miękką osłonę dłoni i paznokci, dzięki czemu ogranicza bezpośredni kontakt ze skórą oraz elementami znajdującymi się w otoczeniu pacjenta.

Produkt jest potocznie nazywany również **rękawiczką przeciw drapaniu**, rękawicą przeciw rozdrapywaniu ran, ochraniaczem na dłoń pacjenta lub rękawicą ograniczającą chwyt. Prawidłowa nazwa produktu to rękawica ochronna Salvacele. Nie jest to jednorazowa rękawica medyczna ani rękawica rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni.

## Jak rękawica Salvacele ogranicza chwytanie?

Wewnątrz rękawicy znajduje się usztywniony panel, który utrudnia pełne zaciśnięcie palców. Pacjentowi trudniej jest skutecznie chwycić przedmiot, użyć paznokci do drapania lub manipulować przy opatrunku. To najważniejsza przewaga Salvacele nad zwykłą miękką rękawiczką, która jedynie przykrywa dłoń, ale nie ogranicza chwytu.

Zewnętrzna część została wykonana z miękkiego weluru i oddychającej siateczki. Zapięcie na rzep pozwala dopasować obwód rękawicy do nadgarstka. Dołączony pasek umożliwia dodatkowe zabezpieczenie rękawicy przy łóżku, jeżeli taki sposób użycia jest zgodny z instrukcją produktu i zasadami opieki nad pacjentem.

## Kiedy stosuje się rękawicę przeciw samookaleczaniu?

Rękawica może stanowić element ochrony pacjenta, gdy występuje ryzyko:

- drapania i uszkodzenia skóry paznokciami,
- rozdrapywania ran lub podrażnionych miejsc,
- samouszkodzeń w obrębie dłoni,
- chwytania przedmiotów bez kontroli,
- manipulowania przy opatrunkach,

- zdejmowania lub przesuwania opatrunków.

Produkt znajduje zastosowanie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych oraz w opiece długoterminowej. Może być używany również podczas opieki domowej, jeżeli sposób zastosowania został prawidłowo dobrany, a pacjent pozostaje pod odpowiednim nadzorem.

## Przewaga rękawicy Salvacel

- **Ośłona i ograniczenie chwytu:** rękawica nie tylko zakrywa paznokcie, ale również utrudnia pełne zamknięcie dłoni.
- **Uniwersalna strona:** nie trzeba wybierać osobnego wariantu na prawą i lewą rękę.
- **Dwa rozmiary:** modele SVC 2500 i SVC 2510 pozwalają lepiej dopasować rękawicę do dłoni pacjenta.
- **Regulacja na rzep:** ułatwia zakładanie oraz kontrolę dopasowania przy nadgarstku.
- **Pasek w zestawie:** umożliwia dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z instrukcją użytkowania.
- **Wielokrotne użycie:** rękawicę można utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami producenta.

## Salvacel SVC 2500 i SVC 2510 – dobór rozmiaru

Rozmiar należy dobrać na podstawie szerokości i długości dłoni oraz obwodu nadgarstka. Rękawica powinna pozostawać na dłoni, ale nie może powodować nadmiernego ucisku.

| Parametr             | M – SVC 2500  | L – SVC 2510  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Maksymalna szerokość | 13,5 cm       | 17 cm         |
| Długość całkowita    | 28 cm         | 31 cm         |
| Obwód w nadgarstku   | 28 cm         | 31 cm         |
| Długość paska        | około 118 cm  | około 122 cm  |
| Kod EAN              | 8436035354054 | 8436035354078 |

## Dane techniczne rękawicy ochronnej

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu              | rękawica ochronna Salvacel                               |
| Producent                   | Medicare System                                          |
| Modele                      | SVC 2500 – rozmiar M; SVC 2510 – rozmiar L               |
| Materiał                    | miękki welur i oddychająca siateczka                     |
| Element ograniczający chwyt | uszywniony panel wewnętrzny                              |
| Zapięcie                    | regulowany rzep                                          |
| Dodatkowe zabezpieczenie    | pasek mocujący                                           |
| Strona                      | na prawą lub lewą dłoń                                   |
| Liczba sztuk                | 1 rękawica z paskiem                                     |
| Gwarancja                   | 24 miesiące                                              |
| Klasyfikacja                | wyrób medyczny, oznaczenie CE                            |
| Czyszczenie                 | zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą producenta |

## Jak założyć rękawicę ochronną?

1. Dobierz rozmiar M lub L na podstawie wymiarów dłoni i nadgarstka.
2. Umieść dłoń wewnątrz rękawicy w prawidłowym położeniu względem panelu.
3. Zapnij rzep tak, aby rękawica nie zsuwała się, ale nie uciskała nadgarstka.
4. Jeżeli wymagane jest użycie paska, zastosuj go wyłącznie zgodnie z instrukcją i zasadami opieki nad pacjentem.
5. Regularnie sprawdzaj ułożenie rękawicy, stan skóry oraz komfort pacjenta.



## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Rękawica Salvacele jest dodatkowym środkiem ochronnym i nie zastępuje nadzoru nad pacjentem. Nie należy przedstawiać jej jako produktu całkowicie eliminującego ryzyko samouszkodzenia. Rękawicę i pasek trzeba stosować zgodnie z instrukcją użytkowania, procedurami placówki oraz decyzją osoby odpowiedzialnej za opiekę.

Jeżeli potrzebne jest mocniejsze ograniczenie ruchu nadgarstka lub kończyny, można porównać rękawicę z [pasem unieruchamiającym na nadgarstek lub kostkę](#). Są to różne produkty: rękawica osłania dłoń i ogranicza chwytanie, natomiast pas służy do stabilizacji kończyny.

## Sprawdź także

### Kategoria produktów

Zobacz również [pasy i akcesoria do zabezpieczenia pacjenta](#), jeżeli kompletujesz wyposażenie szpitala, ZOL, DPS lub placówki opiekuńczej.

### Poradnik

W poradniku [bezpieczeństwo pacjenta i dobór zabezpieczenia w szpitalu](#) wyjaśniamy rodzaje pasów oraz kryteria ich doboru do sytuacji pacjenta i miejsca zastosowania.

### Podobne produkty

- 
- [skórzany pas unieruchamiający na rękę lub nadgarstek - 1 szt.](#)
  - [pas unieruchamiający rękę z zamknięciem magnetycznym](#)
  - [pas unieruchamiający klatkę piersiową do łóżka](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SALVACEL - dobór rozmiaru:** M – SVC 2500 , L – SVC 2510 (+ 10,00 zł )