

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rotor-rehabilitacyjny-do-cwiczen-w-kolorze-czarnym-p-2283.html>



Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń w kolorze czarnym

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	90,74 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Numer katalogowy	SM-TGO-TGR-R-RR-S001

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wyposażony jest w paskowy mechanizm oporowy, cztery nasadki antypoślizgowe oraz opaski na stopy zapinane na zaczep. Posiada obrotowe pokrętło z szerokim zakresem regulacji oporu, dzięki czemu nadaje się dla różnych grup pacjentów. Może być wykorzystywany w szpitalach, hospicjach oraz w domu jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

Elementy rotora:

- opaski na stopy
- pokrętło do regulacji
- nakładki antypoślizgowe
- stalowa rama malowana proszkowo

Rotor rehabilitacyjny stosowany jest u pacjentów, u których nastąpił przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem poprzez opatrunek gipsowy, zabieg operacyjny, jak również u pacjentów, u których potrzebne jest przywrócenie funkcji motorycznych oraz ponowne nauczanie prawidłowego wzorca ruchowego, spowodowanego uszkodzeniem układu neurologicznego. Rotor posiada regulację obciążenia, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie do stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji.

Rotor stworzony został z myślą o kończynach dolnych, ale z powodzeniem można go używać także do rehabilitacji rąk. Wystarczy ustawić go na odpowiedniej wysokości i podłożu.

Uwaga! Podczas regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy używać rotora w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie ramy), ponieważ grozi to wypadkiem.

Rotor jest dostarczany w pełni zmontowany.

Regulacja obciążenia:

Aby podnieść stopień sprawności fizycznej oraz poprawić pracę mięśni i wzrost siły mięśniowej należy stopniowo zwiększać obciążenie treningowe oraz intensywność i/lub czas trwania ćwiczeń.

* Aby zwiększyć opór, należy przekręcić pokrętło regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

* Aby zmniejszyć opór, należy przekręcić pokrętło regulacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

* W przypadku wykonywania ćwiczeń wolnych pokrętło regulacji powinno być całkowicie odkręcone, natomiast w przypadku wykonywania ćwiczeń oporowych pokrętło regulacji należy dokręcić dożądanego obciążenia.

Użytkowanie w przypadku rehabilitacji kończyn dolnych:

- Rotor należy umieścić na podłożu i upewnić się, że nasadki antypoślizgowe dobrze przylegają do podłoża, aby zapobiec


przemieszczaniu się rotora.

b. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej, rotor powinien być ustawiony dokładnie na wprost, tak aby staw biodrowy był zgięty pod kątem nie mniejszym niż 90°.

c. Należy umieścić stopę na pedałach i dopasować obwód rzepa do obwodu stopy, co uniemożliwi ześlizgnięcie się stopy z pedała w trakcie wykonywania ćwiczeń.

d. Za pomocą pokrętła należy dostosować pożądane obciążenie.

Uwaga! Przed ukończeniem ćwiczeń należy odpiąć opaski podtrzymujące stopy.

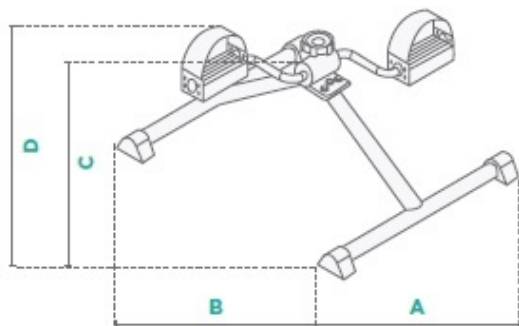

A x B Wymiary: 32 x 45 cm

C Wysokość do podłoża: 40 cm

D Wysokość całkowita: 27 cm

Waga: 1,3 kg

Maksymalne obciążenie: 30 kg

+/- 0,5-1 cm

Uwagi i zalecenia

- * Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń na urządzeniu w pozycji stojącej.
- * Należy upewnić się, że siedzisko jest stabilne, nie należy używać krzeseł na kółkach.
- * Nie wolno stawać na pedałach rotora.
- * Ze względu na ryzyko wypadku niedopuszczalne jest użycie rotora na podłożu nie dającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym.
- * Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi Wytwórcy.
- * Dla zachowania parametrów użytkowych rotora ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości oraz odpowiedni sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaznie, pralnie) lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.