

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ssak-elektryczny-przenosny-yuwell-7e-g1-z-akumulatorem-p-3525.html>



Ssak elektryczny przenośny YUWELL 7E-G1 z akumulatorem

Cena brutto	730,00 zł
Cena netto	675,93 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7E-G1

Opis produktu

Skuteczne odsysanie wydzielin także bez stałego dostępu do gniazdka

Zalegająca wydzielina może utrudniać pacjentowi samodzielne oczyszczanie dróg oddechowych i wymagać zastosowania urządzenia wytwarzającego kontrolowane podciśnienie. W opiece domowej, hospicjum, domu opieki lub placówce medycznej ssak nie zawsze może pracować przy jednym, stałym stanowisku. Właśnie dlatego tak duże znaczenie mają mobilność, wbudowane zasilanie akumulatorowe oraz możliwość szybkiego przeniesienia urządzenia w miejsce, w którym jest aktualnie potrzebne.

Ssak elektryczny przenośny YUWELL 7E-G1 z akumulatorem to wydajne urządzenie medyczne przeznaczone do odsysania zalegających wydzielin oraz innych płynów zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Może być wykorzystywane również do aspiracji krwi i ropy podczas leczenia klinicznego.

Model 7E-G1 łączy wysoką wydajność układu ssącego z możliwością pracy bez bezpośredniego podłączenia do sieci. Przepływ powietrza wynoszący **27 ± 4 l/min**, maksymalne podciśnienie **85 ± 5 kPa**, płynna regulacja siły ssania oraz pojemnik o pojemności **1000 ml** pozwalają przygotować urządzenie do różnych warunków użytkowania.

Dlaczego warto wybrać przenośny ssak YUWELL 7E-G1?

- **Wbudowany akumulator** – umożliwia korzystanie z urządzenia bez stałego podłączenia do gniazdka.
- **Do 60 minut działania na akumulatorze** – większa swoboda podczas opieki nad pacjentem i przenoszenia sprzętu.
- **Możliwość pracy z sieci i akumulatora** – urządzenie można dostosować do aktualnych warunków użytkowania.
- **Opcjonalne zasilanie samochodowe** – po zastosowaniu odpowiedniej ładowarki możliwe jest zasilanie ssaka z instalacji samochodowej.
- **Przepływ powietrza 27 ± 4 l/min** – zapewnia wydajną pracę układu ssącego.
- **Maksymalne podciśnienie 85 ± 5 kPa** – pozwala uzyskać wysoką siłę ssania.
- **Płynna, bezstopniowa regulacja podciśnienia** – umożliwia dopasowanie parametrów pracy do wykonywanej procedury.
- **Czytelny manometr analogowy** – ułatwia kontrolowanie aktualnej wartości podciśnienia.
- **Pojemnik o pojemności 1000 ml** – pozwala gromadzić odsysane płyny podczas użytkowania.
- **Zabezpieczenie przeciwprzelewowe** – pomaga chronić układ urządzenia przed przedostaniem się cieczy.
- **Bezolejowa pompa próżniowa** – nie wymaga uzupełniania oleju i nie generuje mgły olejowej.
- **Poziom hałasu do 65 dB** – ogranicza uciążliwość pracy urządzenia dla pacjenta i opiekuna.
- **Waga 4 kg i wygodny uchwyt** – ułatwiają przenoszenie ssaka pomiędzy pomieszczeniami.
- **Kompletny zestaw podstawowych elementów** – obejmuje rurkę ssącą, cewniki, filtry, bezpieczniki, przewód zasilający i instrukcję.

Wbudowany akumulator – większa niezależność podczas opieki

Najważniejszą przewagą modelu 7E-G1 nad ssakami zasilanymi wyłącznie sieciowo jest możliwość pracy z wbudowanego akumulatora. Urządzenie może zostać przeniesione do innego pomieszczenia lub uruchomione w miejscu, w którym dostęp do gniazdka jest chwilowo utrudniony.

W pełni naładowany akumulator pozwala na łącznie do 60 minut działania urządzenia. Ssak nie jest jednak przeznaczony do nieprzerwanej pracy przez cały ten czas. Zalecany cykl wynosi maksymalnie **30 minut pracy, po których należy zastosować 30 minut przerwy**.

Mobilna konstrukcja sprawia, że YUWELL 7E-G1 może być używany zarówno przy stałym stanowisku, jak i w sytuacjach wymagających przenoszenia urządzenia pomiędzy pacjentami, łózkami lub pomieszczeniami.

Zasilanie sieciowe, akumulatorowe i opcjonalne zasilanie samochodowe

W warunkach domowych i placówkach medycznych ssak może być zasilany z sieci AC 100–240 V, 50/60 Hz. Po odłączeniu przewodu urządzenie może pracować z wbudowanego akumulatora.

Model 7E-G1 może zostać dodatkowo wyposażony w ładowarkę samochodową. Pozwala to zasilać urządzenie z instalacji samochodowej w sytuacjach, w których dostęp do standardowego gniazdka sieciowego jest ograniczony.

Ładowarka samochodowa stanowi wyposażenie opcjonalne i nie znajduje się w standardowym zestawie z urządzeniem.

Przepływ 27 ± 4 l/min i podciśnienie do 85 ± 5 kPa

YUWELL 7E-G1 osiąga przepływ powietrza wynoszący 27 ± 4 l/min oraz maksymalne podciśnienie 85 ± 5 kPa. Parametry te zapewniają wydajną pracę układu ssącego podczas odsysania wydzielin i płynów zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Podciśnienie można ustawiać płynnie za pomocą pokrętki regulacyjnego. Analogowy manometr pozwala na bieżąco kontrolować aktualną wartość i odpowiednio przygotować urządzenie do wykonywanej procedury.

Ustawienie podciśnienia, dobór cewnika oraz sposób przeprowadzenia odsysania powinny być zgodne z instrukcją urządzenia i zaleceniami wykwalifikowanego personelu medycznego.

Bezolejowa pompa próżniowa – prostsza obsługa urządzenia

W modelu 7E-G1 zastosowano bezolejową pompę próżniową. Nie wymaga ona kontrolowania poziomu oleju ani jego uzupełniania, dzięki czemu codzienna obsługa urządzenia jest prostsza.

Pompa nie generuje mgły olejowej, co ogranicza ryzyko zanieczyszczeń związanych z pracą układów olejowych. Urządzenie wytwarza podciśnienie bez generowania dodatniego ciśnienia podczas pracy.

Pojemnik 1000 ml z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym

Odsysane płyny są gromadzone w pojemniku o pojemności 1000 ml. Przezroczysta konstrukcja ułatwia kontrolowanie stopnia napełnienia podczas użytkowania urządzenia.

Pojemnik został wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. Mechanizm pływakowy pomaga ograniczyć ryzyko przedostania się cieczy do przewodów i pompy po osiągnięciu określonego poziomu napełnienia.

Zabezpieczenie przeciwprzelewowe nie zastępuje regularnego kontrolowania ilości płynu. Po napełnieniu pojemnika urządzenie należy wyłączyć, a zbiornik opróżnić i oczyścić zgodnie z instrukcją producenta.

Gdzie może być stosowany przenośny ssak elektryczny 7E-G1?

- w warunkach domowej opieki nad pacjentem,
- w hospicjach i domach opieki,
- w gabinetach lekarskich i zabiegowych,
- w placówkach medycznych,
- podczas wizyt domowych personelu medycznego,
- w pomieszczeniach bez wygodnego dostępu do gniazdka,
- w sytuacjach wymagających przenoszenia urządzenia pomiędzy stanowiskami.

Model YUWELL 7E-G1 będzie szczególnie przydatny tam, gdzie urządzenie nie może pozostawać na stałe w jednym miejscu. Akumulator pozwala ograniczyć zależność od przewodu sieciowego i zapewnia większą swobodę organizacji opieki.

Dla kogo odpowiedni będzie ssak z akumulatorem?

Przenośny ssak medyczny 7E-G1 warto wybrać, gdy urządzenie ma być wykorzystywane w kilku pomieszczeniach, regularnie przenoszone lub uruchamiane w miejscu bez stałego dostępu do zasilania sieciowego.

Jest to także odpowiedni wariant dla użytkowników, którym zależy na zachowaniu możliwości pracy urządzenia podczas krótkotrwałego braku prądu lub konieczności przemieszczania sprzętu.

YUWELL 7E-G1 czy inny rodzaj ssaka medycznego?

YUWELL 7E-G1 warto wybrać wtedy, gdy najważniejsze są mobilność, wbudowany akumulator i możliwość pracy bez stałego podłączenia do gniazda. Model może być przenoszony pomiędzy pomieszczeniami oraz używany podczas krótkotrwałego braku dostępu do zasilania sieciowego.

Określenia „przenośny” i „akumulatorowy” nie zawsze oznaczają tę samą cechę urządzenia. Sprawdź, [czym różni się ssak przenośny od akumulatorowego](#) i porównaj modele sieciowe, akumulatorowe oraz przejezdne przed podjęciem decyzji.

Jeżeli urządzenie będzie wykorzystywane głównie przy jednym stanowisku z dostępem do sieci elektrycznej, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem może być [kompaktowy ssak sieciowy YUWELL 7E-H1](#).

Gdy potrzebne są dwa zbiorniki po 2500 ml, koła transportowe oraz sterowanie ręczne i nożne, sprawdź [przejezdny ssak medyczny YUWELL 7A-23D](#).

Dane techniczne ssaka YUWELL 7E-G1

Marka	YUWELL
Model	7E-G1
Rodzaj urządzenia	przenośny ssak elektryczny z akumulatorem
Przeznaczenie	odsysanie wydzielin i płynów zgodnie z przeznaczeniem wyrobu
Zasilanie sieciowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Zasilanie akumulatorowe	wbudowany akumulator
Opcjonalne zasilanie	ładowarka samochodowa
Czas działania na akumulatorze	łącznie do 60 minut
Cykl pracy	30 minut pracy / 30 minut przerwy
Pobór mocy	150 VA
Maksymalne podciśnienie	85 ± 5 kPa
Regulacja podciśnienia	płynna, bezstopniowa
Przepływ powietrza	27 ± 4 l/min
Pojemność pojemnika	1000 ml
Rodzaj pompy	bezolejowa pompa próżniowa
Manometr	analogowy
Zabezpieczenie przeciwprzelewowe	tak
Poziom hałasu	≤65 dB
Wymiary	48 × 18,9 × 28,5 cm
Waga	4 kg
Status produktu	wyrób medyczny
Oznakowanie zgodności	CE

Wyrób medyczny oznakowany CE

YUWELL 7E-G1 jest wyrobem medycznym oznakowanym CE. Informacje dotyczące statusu produktu i zgodności zostały potwierdzone przez producenta lub dystrybutora.

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem, instrukcją obsługi oraz zaleceniami wykwalifikowanego personelu medycznego. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z zasadami montażu, czyszczenia i bezpiecznej obsługi.

Co znajduje się w zestawie z ssakiem YUWELL 7E-G1?

Urządzenie jest dostarczane z podstawowymi elementami niezbędnymi do jego przygotowania i rozpoczęcia użytkowania. Klient otrzymuje przewody, cewniki ssące, filtry powietrza, zapasowe bezpieczniki, przewód zasilający oraz instrukcję obsługi.

- **Filtr powietrza z rurkami przyłączeniowymi** – 1 komplet.
- **Zapasowy filtr powietrza** – 2 sztuki.
- **Bezpiecznik typu F1,6AL250V, 5 × 20 mm** – 2 sztuki.
- **Rurka ssąca** – 1 komplet.

-
- **Cewniki ssące** – 1 komplet.
 - **Przewód zasilający** – 1 sztuka.
 - **Instrukcja obsługi** – 1 sztuka.

Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić kompletność zestawu, prawidłowo połączyć wszystkie elementy zgodnie z instrukcją oraz upewnić się, że filtr i zabezpieczenie przeciwprzelewowe zostały właściwie zamontowane.

Wypożyczenie opcjonalne do ssaka 7E-G1

Podstawowe cewniki, przewody i filtry znajdują się w komplecie z urządzeniem. Ssak może zostać dodatkowo wyposażony w:

- jednorazowe wkłady ssące kompatybilne z urządzeniem,
- dedykowaną ładowarkę samochodową.

Wypożyczenie opcjonalne nie jest częścią standardowego zestawu i należy zamówić je oddzielnie.

Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podciśnienie powinno zostać dobrane do wykonywanej procedury.
- Jednorazowy czas pracy nie powinien przekraczać 30 minut.
- Po 30 minutach działania należy zastosować 30 minut przerwy.
- Podczas odsysania należy kontrolować poziom płynu w pojemniku.
- Nie należy korzystać z urządzenia bez prawidłowo zamontowanego zabezpieczenia przeciwprzelewowego.
- Elementy mające kontakt z wydzieliną należy czyścić, dezynfekować lub wymieniać zgodnie z instrukcją.
- Do zasilania samochodowego należy używać wyłącznie odpowiednich akcesoriów przeznaczonych do urządzenia.

Zobacz również pozostałe [ssaki medyczne do odsysania wydzielin](#) i porównaj modele sieciowe, akumulatorowe oraz przejezdne.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.