

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stabilny-regal-magazynowy-p-3430.html>



## Stabilny regał magazynowy

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 474,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2 824,39 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-RM-02/800x500</b> |
| Kod producenta   | <b>TMBY-RM-02</b>            |

### Opis produktu

### Wytrzymały regał magazynowy ze stali kwasoodpornej do sterylizatorni

Ten metalowy regał magazynowy to kluczowy element wyposażenia medycznego, stworzony z myślą o najwyższych standardach czystości i trwałości. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania narzędzi, pojemników i sprzętu w sterylizatorniach, laboratoriach i placówkach medycznych. Perforowane półki zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza, a stabilna konstrukcja i regulowane stopki gwarantują bezpieczeństwo i łatwe wypoziomowanie.

### Kluczowe korzyści

**Odporność na korozję:** Wykonanie ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 (AISI 304) zapewnia całkowitą odporność na wilgoć, środki dezynfekcyjne i korozję, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

**Optymalna cyrkulacja:** Perforowane półki umożliwiają swobodny przepływ powietrza, co przyspiesza proces suszenia i zapobiega gromadzeniu się wilgoci.

**Stabilna i bezpieczna konstrukcja:** Stabilny regał magazynowy wytrzymuje obciążenie do 30 kg na każdą półkę, a regulowane stopki pozwalają na idealne wypoziomowanie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

### Dla kogo / Nie dla kogo

#### **Dla kogo:**

sterylizatornie, pracownie medyczne, laboratoria – wyposażenie medyczne do sterylizatorni;  
oddziały i magazyny szpitalne – wyposażenie szpitalne;  
zaplecza gabinetów, aptek i hurtowni medycznych – metalowy regał magazynowy.

#### **Nie dla kogo:**

środowiska poniżej +10 °C lub powyżej +40 °C;  
pomieszczenia o wilgotności >75%;  
zastosowania przekraczające 30 kg na półkę lub 120 kg łącznie;  
agresywne chemiczne strefy bez dodatkowych zabezpieczeń materiałowych.

## Scenariusze użycia

- Sterylizatornia – składowanie koszy i pojemników z narzędziami po myciu/wyjaławianiu; łatwe utrzymanie czystości.
- Magazyn oddziału – zapas opatrunków i środków jednorazowych w systemie FIFO; szybki dostęp.
- Pracownia diagnostyczna – przechowywanie kuwet, odczynników w pojemnikach zamkniętych i drobnego sprzętu pomocniczego.

## Dobór wariantu/rozmiaru

Ten model: 800 (szer.) × 500 (gł.) × 1800 mm (wys.); 4 półki perforowane o stałej wysokości.

Nośność: planuj do 30 kg na półkę i ≤120 kg łącznie.

Ustawienie: sprawdź szerokość ciągów komunikacyjnych i możliwość wypoziomowania podłoża.

Opcje: regulacja wysokości półek – (dostępna jako opcja); kotwienie do ściany – opcja (za dopłatą).

## Pielęgnacja

1. Czyść miękką, wilgotną ściereczką; dopuszczalne środki: łagodne detergenty i środki do stali – bez cząstek ściernych.
2. Nie stosuj parowej ani wodnej sterylizacji; unikaj środków trwale barwiących (np. jodyna, denaturat).
3. Po myciu i dezynfekcji wykonuj konserwację powierzchni.
4. Przy nalocie rdzawym: renowacja preparatem do stali (np. WURTH), następnie zmyj wodą i zabezpiecz środkiem ochronnym (np. saBesto).
5. Przed pierwszym użyciem – dezynfekcja.

## Dowody jakości / certyfikacje

Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 – powszechnie stosowana w środowiskach medycznych.

Test stabilności (wewnętrzny): 50 kg na każdą półkę przez 30 min – brak odkształceń/stabilność zachowana.

## Przeglądy okresowe

- Co ≤12 miesięcy: skontroluj mocowanie półek, wszystkie połączenia skręcane, stan nóg i stopek.
- Brak dopuszczalnych pęknięć, deformacji, luzów.
- Dokumentuj wyniki i przechowuj zapisy 5 lat.
- Przeglądy wykonują osoby wyznaczone z odpowiednimi uprawnieniami.

## Parametry techniczne

| Parametr          | Wartość                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Typ produktu      | Regał do pracowni medycznych / regał magazynowy  |
| Materiał          | Stal kwasoodporna 0H18N9                         |
| Wymiary (S×G×W)   | 800×500×1800 mm                                  |
| Liczba półek      | 4 (perforowane)                                  |
| Wysokość półek    | stała <b>(regulacja dostępna jako opcja)</b>     |
| Udźwig na półkę   | 30 kg                                            |
| Udźwig całkowity  | 120 kg                                           |
| Ciężar własny     | 25 kg                                            |
| Montaż            | skręcany                                         |
| Stopki regulowane | poziomowanie                                     |
| Kotwienie         | <b>opcja [dodatkowo płatna]</b>                  |
| Warunki pracy     | +10...+40 °C; 30...75% RH                        |
| Przeznaczenie     | składowanie wyposażenia i materiałów w medycynie |
| Gwarancja         | 12 miesięcy                                      |
| Kraj pochodzenia  | Polska                                           |

## FAQ, często zadawane pytania;

1. Czy można zmienić wysokość półek?

---

W wersji standardowej – nie. Regulacja dostępna jako opcja [uzupełnij].

2. Czy regał nadaje się do sterylizatorni?

Tak – wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9 sprzyja higienie. Należy przestrzegać zasad pielęgnacji.

3. Jakie są wymagania podłoża?

Równe, utwardzone, o nośności z zapasem +50% względem planowanego obciążenia regału.

4. Czy warto kotwić regał?

Zalecane w strefach o zwiększonym ryzyku uderzeń/wstrząsów lub przy wysokim ruchu – opcja.

5. Jakie środki czyszczące stosować?

Łagodne detergenty i środki do stali; bez pary/wody pod ciśnieniem; unikać środków barwiących (jodyna, denaturat).

### **Uwaga!**

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

### **Uwaga!**

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

## **Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej**

| Preparat         | Preparat                        | Preparat                     | Preparat                  |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ANIOSYME DD1     | DESCOCID                        | Mikrozid® AF liquid          | Terralin protect do 2%    |
| Aniosyme Synergy | DESPREJ                         | Mikrozid chusteczki          | Mikrozid sensitive liquid |
| Anioxyde 1000    | DESCOCEPT                       | VIRUSOLVE+ chusteczki        | Velox Spray Neutral       |
| ALDEWIR          | INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO | Sani-Cloth Active chusteczki | Velox® Foam Extra         |
| CIDEX            | PERA SAFE                       | Steranios 2%                 | Quatrodex® Extra oraz One |
| DISTEL           | Incidin OxyWipe                 | Surfa Safe                   | -                         |

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Możliwość regulacji półek:** Nie , Tak