

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-lazienkowy-p-3208.html>



Taboret prysznicowy okrągły Timago KING-STRA-20 150 kg

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	115,74 zł
Cena poprzednia	130,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KING-STRA-20

Opis produktu

Gdy trudno długo stać podczas kąpieli

Taboret prysznicowy okrągły Timago KING umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej podczas mycia. Jest przeznaczony dla osób, którym osłabienie, ograniczona sprawność ruchowa albo szybkie męczenie się utrudniają dłuższe stanie pod prysznicem.

Wariant biały jest oznaczony jako **KING-STRA-20**, natomiast wariant czarny jako **KING-BSTRA-20**. Oba warianty mają okrągłe siedzisko o średnicy 33 cm, regulację wysokości 39-54 cm i maksymalne obciążenie 150 kg.

Produkt bywa również nazywany **stołkiem pod prysznic**, **taboretą pod prysznic**, **taboretą łazienkową** albo okrągłym siedziskiem do kąpieli. Jest to model wolnostojący, bez oparcia i bez bocznych uchwytów.

Najważniejsze parametry Timago KING-STRA-20

- **maksymalne obciążenie: 150 kg,**
- **średnica siedziska: 33 cm,**
- **regulacja wysokości: 39-54 cm,**
- **masa produktu: 1,55 kg,**
- lekka rama wykonana z aluminium,
- siedzisko wykonane z PCV,
- gumowe nasadki zwiększające przyczepność nóg do podłoża,
- kolor biały lub czarny.

Przewaga produktu: 150 kg obciążenia przy masie 1,55 kg

Najważniejszą przewagą tego modelu jest połączenie **maksymalnego obciążenia 150 kg** z niewielką masą własną wynoszącą 1,55 kg. Taboret można dzięki temu łatwiej przestawić, wyjąć z kabiny lub odstawić po zakończeniu kąpieli.

Okrągłe siedzisko ma średnicę 33 cm. Brak oparcia i podłokietników sprawia, że produkt ma prostszą konstrukcję niż pełne krzesło prysznicowe. Jest przeznaczony dla użytkownika, który potrzebuje miejsca do siedzenia, ale potrafi samodzielnie utrzymać stabilną pozycję tułowia.

Siedzisko 33 cm – co zmierzyć przed zakupem?

Średnica 33 cm dotyczy samego siedziska, a nie całkowitego rozstawu nóg. Przed zakupem należy zmierzyć rzeczywistą

przestrzeń wewnątrz kabiny, uwzględniając brodzik, prowadnice drzwi, baterię, próg oraz miejsce potrzebne na stopy użytkownika.

Wszystkie cztery nogi muszą stać na równym podłożu. Żadna nasadka nie może znajdować się na zaokrągleniu brodzika, odpływie ani poza stabilną powierzchnią.

Jeżeli nie masz pewności, jak wykonać pomiar, przeczytaj poradnik: [jak dobrać taboret lub krzesło prysznicowe do wymiarów kabiny](#).

Regulacja wysokości 39-54 cm

Zakres regulacji od 39 do 54 cm pozwala dopasować poziom siedziska do wzrostu użytkownika i warunków w łazience. Wyższe ustawienie może ułatwiać siadanie i wstawanie, natomiast zbyt wysoki taboret może uniemożliwić pełne oparcie stóp na podłożu.

Po ustawieniu wysokości wszystkie nogi muszą mieć identyczną długość. Przed użyciem należy sprawdzić, czy elementy regulacyjne są prawidłowo zablokowane i czy taboret nie kołysze się pod naciskiem.

Kiedy ten taboret będzie właściwym wyborem?

- gdy użytkownik nie może lub nie chce stać przez cały czas kąpieli,
- gdy nie jest potrzebne oparcie pleców ani boczne uchwyty,
- gdy potrzebny jest model o obciążeniu do 150 kg,
- gdy ważna jest niska masa produktu i możliwość łatwego przestawiania,
- gdy użytkownik preferuje okrągłe siedzisko,
- gdy wysokość siedziska trzeba dopasować w zakresie 39-54 cm.

Kiedy lepiej wybrać inny model?

Jeżeli użytkownik woli kwadratową powierzchnię siedziska, warto porównać [kwadratowy taboret prysznicowy Timago KING do 150 kg](#).

Jeżeli podczas siadania lub wstawania potrzebne jest podparcie dłoni, lepszym wyborem może być [taboret prysznicowy Timago KING-SS1-20 z bocznymi uchwytami](#).

Osoba mająca trudność z utrzymaniem stabilnej pozycji tułowia powinna rozważyć [taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi](#).

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Okrągły taboret prysznicowy
Marka	Timago
Producent	LM Global
Model biały	KING-STRA-20
Model czarny	KING-BSTRA-20
Średnica siedziska	33 cm
Regulacja wysokości	39-54 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Masa produktu	1,55 kg
Materiał ramy	Aluminium
Materiał siedziska	PCV
Zakończenie nóg	Gumowe nasadki antypoślizgowe

Oparcie	Nie
Uchwyty boczne	Nie
Zastosowanie	Prysznic, wanna, łazienka i inne wilgotne pomieszczenia
Warunki użytkowania	Domowe, opiekuńcze i szpitalne
Tolerancja wymiarów	±0,5-1 cm

Użytkowanie pod prysznicem i w wannie

Producent przewiduje stosowanie taboretu pod prysznicem, w wannie, łazience oraz innych wilgotnych pomieszczeniach. W przypadku ustawienia w wannie jej dno musi pozwalać na równe i stabilne oparcie wszystkich czterech nóg.

Gumowe nasadki zwiększają przyczepność, ale nie eliminują ryzyka przesunięcia produktu na mokrym, nierównym lub zabrudzonym podłożu.

Zasady bezpiecznego ustawienia

- Ustaw wszystkie nogi na tej samej wysokości.
- Sprawdź zablokowanie mechanizmów regulacyjnych.
- Używaj taboretu wyłącznie na równym i stabilnym podłożu.
- Przed kąpielą sprawdź kompletność i stan gumowych nasadek.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Nie używaj taboretu jako stopnia, podestu ani drabinki.
- Po użyciu oczyść produkt i pozostaw go do wyschnięcia.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta.

Zobacz całą kategorię

Porównaj dostępne [taborety, krzesła i siedziska prysznicowe](#) według wymiarów, obciążenia oraz poziomu podparcia.

Nie wiesz, jaki typ siedziska wybrać?

Przeczytaj poradnik [taboret, krzesło czy ławeczka prysznicowa - co wybrać i jak ustawić](#).

Porównaj podobne taborety prysznicowe

- [okrągły taboret Timago TGR-R KP-O 3432 do 136 kg,](#)
- [okrągły taboret prysznicowy z obrotowym siedziskiem,](#)
- [trójkątny stółek prysznicowy Timago KING.](#)

Wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor taboretu: Nie wybrano , Czarny , Biały