

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tlenoterapia-w-domu-przenosny-koncentrator-p-3355.html>



Przenośny koncentrator tlenu YUWELL SPIRIT-3 - bateria do 5 godzin

Cena brutto	5 468,00 zł
Cena netto	5 062,96 zł
Cena poprzednia	6 068,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPIRIT-3

Opis produktu

Więcej swobody podczas tlenoterapii

Tlenoterapia nie musi oznaczać pozostawania w jednym miejscu. Przenośny koncentrator tlenu **YUWELL SPIRIT-3** został stworzony dla osób, które potrzebują tlenu, ale jednocześnie chcą zachować większą niezależność podczas codziennego funkcjonowania.

Dzięki masie zaledwie **2,4 kg z baterią**, kompaktowym wymiarom oraz dołączonej torbie transportowej SPIRIT-3 można łatwiej zabrać ze sobą na spacer, wizytę, wyjazd lub podróż samochodem. Wbudowana bateria pozwala na pracę do **5 godzin**, zależnie od wybranego poziomu pracy.

To kompletny, przenośny wyrób medyczny do tlenoterapii pulsacyjnej, wyposażony w baterię litowo-jonową, zasilanie AC i DC, kolorowy wyświetlacz oraz system alarmowy.

Dlaczego warto wybrać YUWELL SPIRIT-3?

- **Do 5 godzin pracy na baterii** - swoboda korzystania z urządzenia poza domem.
- **Masa tylko 2,4 kg z baterią** - łatwiejsze przenoszenie i transport.
- **4 poziomy pracy** - możliwość dopasowania działania urządzenia do zaleceń terapii.
- **Stężenie tlenu 90% +6%/-3%** przy nominalnej mocy wyjściowej.
- **Zasilanie AC i DC** - możliwość korzystania w domu oraz poza standardowym gniazdem sieciowym.
- **Kolorowy wyświetlacz** - czytelna kontrola ustawień i pracy koncentratora.
- **System alarmowy** - dodatkowe wsparcie bezpieczeństwa użytkownika.
- **Torba transportowa w zestawie** - wygodniejsze przenoszenie urządzenia.
- **Kompaktowa konstrukcja** - wymiary tylko 22 × 8 × 22 cm.

Przenośny koncentrator tlenu do domu, podróży i codziennej aktywności

YUWELL SPIRIT-3 jest przeznaczony dla osób, którym zalecono tlenoterapię z wykorzystaniem przepływu pulsacyjnego i które potrzebują większej swobody niż przy korzystaniu wyłącznie z koncentratora stacjonarnego.

Niewielka masa, bateria i torba transportowa sprawiają, że urządzenie można wykorzystać podczas:

- spacerów i codziennego przemieszczania się,
- wizyt poza domem,
- podróży samochodem,

-
- wyjazdów i pobyków w różnych miejscach,
 - odpoczynku poza domem,
 - codziennych aktywności wymagających mobilnego źródła tlenu.

SPIRIT-3 pozwala ograniczyć zależność od jednego miejsca i korzystać z tlenoterapii również wtedy, gdy konieczne jest wyjście z domu.

Ważne: SPIRIT-3 wykorzystuje przepływ pulsacyjny

Koncentrator podaje tlen w postaci pulsacyjnych dawek, a nie w przepływie ciągłym. Przed zakupem należy upewnić się, że taki sposób podaży tlenu odpowiada zaleceniom lekarza oraz potrzebom użytkownika.

Cztery poziomy pracy pozwalają dopasować działanie urządzenia do zaleconych ustawień oraz planowanego czasu korzystania z baterii. Poziomu pracy nie należy zmieniać samodzielnie bez konsultacji i bez zapoznania się z instrukcją obsługi.

4 poziomy pracy i dokładnie określony czas działania

Jedną z najważniejszych zalet SPIRIT-3 jest możliwość wyboru jednego z czterech poziomów pracy. Dzięki temu użytkownik może korzystać z urządzenia w sposób dopasowany do zaleconej terapii oraz czasu, jaki ma spędzić poza domem.

Poziom pracy	Maksymalny czas działania
Poziom 1	do 5 godzin
Poziom 2	do 3 godzin 20 minut
Poziom 3	do 2 godzin 20 minut
Poziom 4	do 2 godzin

Podane czasy dotyczą pracy przy pełnej baterii. Rzeczywisty czas działania może zależeć od wybranego poziomu, sposobu użytkowania, temperatury oraz źródła zasilania.

Mobilność bez rezygnacji z funkcjonalności

Przenośne urządzenie powinno być nie tylko małe, ale również wygodne i praktyczne w codziennym użyciu. SPIRIT-3 łączy niską masę z wyposażeniem, które ułatwia korzystanie z koncentratora poza domem.

- **1,8 kg bez baterii** – niska masa samego urządzenia.
- **2,4 kg z baterią** – rzeczywista masa zestawu gotowego do przenoszenia.
- **22 x 8 x 22 cm** – kompaktowa obudowa zajmująca niewiele miejsca.
- **Torba transportowa** – wygodne przenoszenie koncentratora.
- **Kolorowy wyświetlacz** – łatwiejsza kontrola pracy.
- **System alarmowy** – sygnalizacja sytuacji wymagających uwagi użytkownika.

Zasilanie w domu i poza domem

YUWELL SPIRIT-3 może być zasilany z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza AC lub z wykorzystaniem przewodu DC. Pozwala to korzystać z urządzenia w domu, a także w innych warunkach zgodnie z instrukcją producenta.

Maksymalny czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii wynosi około **3 godziny 40 minut**. Przy zastosowaniu kompatybilnej szybkiej ładowarki czas ten może zostać skrócony do około **2 godzin**. Szybka ładowarka nie znajduje się w zestawie.

Dla kogo jest YUWELL SPIRIT-3?

SPIRIT-3 będzie dobrym wyborem dla osoby, która:

- ma zaleconą tlenoterapię pulsacyjną,
- potrzebuje korzystać z tlenu także poza domem,
- chce mieć możliwość pracy urządzenia na baterii,
- szuka lekkiego i kompaktowego koncentratora,
- często przemieszcza się lub podróżuje samochodem,
- potrzebuje mobilnego uzupełnienia tlenoterapii prowadzonej w domu,
- oczekuje kompletnego zestawu z torbą, baterią i zasilaniem AC/DC.

Kiedy lepiej wybrać koncentrator stacjonarny?

SPIRIT-3 nie powinien być wybierany wyłącznie na podstawie masy lub czasu pracy baterii. Jeżeli lekarz zalecił przepływ ciągły, większą wydajność albo wielogodzinną terapię przy zasilaniu sieciowym, właściwszy może być koncentrator

stacjonarny.

W takiej sytuacji sprawdź również:

- [YUWELL 8F-10 – stacjonarny koncentrator tlenu do 10 l/min,](#)
- [YUWELL 8F-5A – stacjonarny koncentrator tlenu do 5 l/min,](#)
- [pełną kategorię koncentratorów tlenu.](#)

Dobór przepływu, trybu pracy i czasu tlenoterapii powinien zawsze wynikać z zaleceń lekarza.

SPIRIT-3 wykorzystuje podawanie tlenu w trybie pulsacyjnym, dlatego przed zakupem warto sprawdzić [różnicę między przepływem ciągłym a pulsacyjnym](#). W poradniku wyjaśniamy także, kiedy koncentrator przenośny może odpowiadać zalecanej terapii, a kiedy właściwszy będzie model stacjonarny.

Dane techniczne YUWELL SPIRIT-3

Model	YUWELL SPIRIT-3
Rodzaj urządzenia	Przenośny koncentrator tlenu
Rodzaj przepływu	Pulsacyjny
Liczba poziomów pracy	4
Stężenie tlenu przy nominalnej mocy wyjściowej	90% +6%/-3%
Maksymalne ograniczone ciśnienie	150 kPa
Poziom hałasu	55 dB
Pobór mocy	110 W
Waga bez baterii	1,8 kg
Waga z baterią	2,4 kg
Wymiary	22 × 8 × 22 cm
Typ baterii	Litowo-jonowa
Maksymalny czas ładowania	3 godziny 40 minut
Możliwość szybkiego ładowania	Do około 2 godzin z kompatybilną szybką ładowarką, brak w zestawie

Zawartość zestawu

- koncentrator tlenu YUWELL SPIRIT-3,
- bateria litowo-jonowa,
- zasilacz AC,
- przewód zasilający DC,
- kaniula nosowa,
- filtr,
- torba transportowa,
- instrukcja obsługi.

Bezpieczne użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dokumentacja zawiera informacje dotyczące uruchomienia, wyboru poziomu pracy, ładowania baterii, czyszczenia, konserwacji oraz reagowania na alarmy.

Koncentrator należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją producenta oraz zaleceniami lekarza. Poziom pracy i czas tlenoterapii powinny być dobrane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

[Pobierz instrukcję obsługi YUWELL SPIRIT-3](#)

Podsumowanie

YUWELL SPIRIT-3 to przenośny koncentrator tlenu dla osób, które potrzebują mobilnego rozwiązania do tlenoterapii pulsacyjnej. Niska masa, bateria do 5 godzin, cztery poziomy pracy, zasilanie AC/DC, kolorowy wyświetlacz i torba transportowa tworzą kompletny zestaw do korzystania z urządzenia w domu i poza nim.

Jeżeli najważniejsze są dla Ciebie mobilność, możliwość pracy na baterii oraz łatwiejsze przemieszczanie się podczas tlenoterapii, SPIRIT-3 jest jednym z najbardziej praktycznych modeli w swojej klasie.