

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/urzadzenie-do-tlenoterapii-koncentrator-tlenu-8f-10-p-3353.html>



Koncentrator tlenu YUWELL 8F-10 10 l/min z czujnikiem stężenia

Cena brutto	3 940,00 zł
Cena netto	3 648,15 zł
Cena poprzednia	4 500,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8F-10

Opis produktu

Koncentrator tlenu YUWELL 8F-10 do 10 l/min

W przypadku tlenoterapii prowadzonej w domu lub placówce medycznej znaczenie ma nie tylko możliwość dostarczania tlenu, ale także odpowiedni przepływ, kontrola stężenia i szybka sygnalizacja nieprawidłowości. **Koncentrator tlenu YUWELL 8F-10** został przeznaczony dla użytkowników, którym zalecono tlenoterapię z przepływem do 10 l/min.

YUWELL 8F-10 jest stacjonarnym wyrobem medycznym do tlenoterapii domowej i medycznej. Urządzenie pobiera powietrze z pomieszczenia, oddziela z niego tlen, a następnie dostarcza go użytkownikowi w postaci skoncentrowanego strumienia. Producent podaje stężenie tlenu na poziomie **87-96%**.

To model przeznaczony przede wszystkim dla osób, dla których standardowy koncentrator tlenu 5 l/min może nie zapewniać zaleconego przepływu. Dobór urządzenia, ustawienie przepływu oraz czas prowadzenia terapii powinny zawsze wynikać z zaleceń lekarza.

Dlaczego warto wybrać YUWELL 8F-10?

- **Przepływ do 10 l/min** – rozwiązanie dla terapii wymagającej większego przepływu niż standardowe koncentratory 5 l/min.
- **Czujnik stężenia tlenu** – umożliwia kontrolę poziomu stężenia tlenu dostarczanego przez urządzenie.
- **System alarmów bezpieczeństwa** – informuje o braku zasilania, awarii, niskim stężeniu tlenu, zbyt wysokiej temperaturze i innych nieprawidłowościach.
- **Ochrona kompresora przed przegrzaniem** – zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni podzespoły urządzenia.
- **Zawór nadmiarowy** – dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji.
- **Monitorowanie całkowitego czasu eksploatacji** – pozwala kontrolować czas pracy urządzenia.
- **Stacjonarna konstrukcja** – przeznaczona do ustawienia w domu, gabinecie lub placówce medycznej.
- **Prosta obsługa** – urządzenie zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu zgodnie z instrukcją.

Czy YUWELL 8F-10 jest dla mnie?

Ten model warto rozważyć, jeśli:

- lekarz zalecił przepływ tlenu do 10 l/min;
- potrzebujesz stacjonarnego koncentratora do użytkowania w domu;
- ważna jest kontrola stężenia tlenu;

- chcesz korzystać z urządzenia wyposażonego w system alarmów;
- potrzebujesz rozwiązania do tlenoterapii domowej lub medycznej;
- nie planujesz regularnego przenoszenia urządzenia poza miejsce użytkowania.

YUWELL 8F-10 może nie być właściwym wyborem, jeśli:

- zalecony przepływ nie przekracza 5 l/min i wystarczy mniejszy koncentrator;
- potrzebujesz urządzenia lekkiego i przenośnego;
- chcesz korzystać z koncentratora poza domem lub w podróży;
- nie masz zaleceń medycznych dotyczących tlenoterapii.

Kiedy nie wybierać koncentratora 10 l/min?

Większy maksymalny przepływ nie oznacza automatycznie, że urządzenie będzie lepsze dla każdego użytkownika. Jeżeli zalecona terapia wymaga przepływu do 5 l/min, bardziej ekonomicznym i wystarczającym wyborem może być [koncentrator YUWELL 8F-5A](#).

Jeżeli urządzenie ma być wykorzystywane poza domem, należy sprawdzić [koncentrator przenośny](#). YUWELL 8F-10 jest urządzeniem stacjonarnym o wadze 24 kg i wymiarach 41 × 37,5 × 66,8 cm.

Koncentrator 5 l/min czy 10 l/min?

Potrzeba użytkownika	Najlepszy kierunek wyboru	Dlaczego?
Zalecony przepływ do 5 l/min	YUWELL 8F-5A	Wystarczający przepływ i mniejsza konstrukcja.
Zalecony przepływ do 10 l/min	YUWELL 8F-10	Możliwość pracy z przepływem do 10 l/min.
Potrzeba kontroli stężenia tlenu	YUWELL 8F-10	Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu.
Potrzeba rozbudowanej sygnalizacji	YUWELL 8F-10	Alarmy informują o wybranych nieprawidłowościach pracy.
Korzystanie poza domem	Koncentrator przenośny	Lżejsza konstrukcja przeznaczona do przemieszczania.

Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać koncentrator 5 l/min czy 10 l/min, przeczytaj nasze [porównanie koncentratorów tlenu 5 l/min i 10 l/min](#). Wyjaśniamy, kiedy większy przepływ może być uzasadniony, czym różni się przepływ ciągły od pulsacyjnego i dlaczego urządzenie należy dobrać do zaleceń lekarza.

Czujnik stężenia tlenu – ważny element wyposażenia

YUWELL 8F-10 został wyposażony w **czujnik stężenia tlenu**, który umożliwia kontrolę poziomu tlenu wytwarzanego przez urządzenie. To szczególnie istotne w przypadku osób, dla których ważne jest monitorowanie parametrów pracy koncentratora.

Producent podaje zakres stężenia tlenu wynoszący **87-96%**. Ostateczne parametry pracy mogą zależeć od warunków użytkowania, ustawionego przepływu i prawidłowej eksploatacji urządzenia.

System alarmów i zabezpieczenia

Koncentrator wyposażono w system sygnalizacji, który pomaga rozpoznać sytuacje wymagające uwagi użytkownika. Urządzenie może informować między innymi o:

- braku zasilania;
- awarii urządzenia;
- zbyt niskim stężeniu tlenu;
- zbyt wysokiej temperaturze;
- innych nieprawidłowościach w pracy.

Dodatkowo kompresor posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem, a zastosowany zawór nadmiarowy zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkownika.

Co oznaczają najważniejsze parametry?

Parametr	Znaczenie dla użytkownika
Przepływ do 10 l/min	Urządzenie może być stosowane przy terapii wymagającej większego przepływu niż 5 l/min, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Stężenie tlenu 87-96%	Zakres stężenia tlenu podawany przez producenta.

Parametr	Znaczenie dla użytkownika
Hałas 49-55 dB(A)	Poziom głośności zmierzony odpowiednio w odległości 2 m i 1 m od urządzenia.
Pobór mocy 700 W	Informacja istotna przy planowaniu miejsca użytkowania i kosztów energii elektrycznej.
Waga 24 kg	Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do użytkowania stacjonarnego.
Wymiary 41 × 37,5 × 66,8 cm	Przed zakupem należy przygotować stabilne miejsce zapewniające swobodny dostęp do urządzenia.
Maksymalne ograniczone ciśnienie 150 kPa	Parametr techniczny określający maksymalne ograniczone ciśnienie urządzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	YUWELL 8F-10
Rodzaj urządzenia	Stacjonarny koncentrator tlenu
Zasilanie	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy	700 W
Maksymalne zalecane natężenie przepływu	Do 10 l/min
Maksymalne ograniczone ciśnienie	150 kPa
Stężenie tlenu	87-96%
Poziom głośności	49 dB(A) w odległości 2 m; 55 dB(A) w odległości 1 m
Wymiary	41 × 37,5 × 66,8 cm
Waga	24 kg

Co znajduje się w zestawie?

- Koncentrator tlenu YUWELL 8F-10 – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.
- Filtr – 1 szt.
- Zawór antypożarowy – 1 szt.
- Kaniula nosowa – 1 szt.

Dlaczego warto kupić w SaleMED?

- **Specjalistyczny asortyment medyczny** – możliwość porównania różnych typów koncentratorów tlenu.
- **Dobór urządzenia do potrzeb** – na karcie można porównać model 5 l/min, 10 l/min oraz koncentrator przenośny.
- **Kompletny zestaw** – urządzenie jest oferowane z instrukcją, filtrem, zaworem antypożarowym i kaniulą nosową.
- **Dokumentacja produktu** – instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania przed zakupem.
- **5 lat gwarancji** – zgodnie z warunkami aktualnej karty gwarancyjnej.
- **Bezpieczny zakup online** – przed zakupem można zapoznać się z parametrami, wyposażeniem i instrukcją.

Bezpieczne użytkowanie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją obsługi, oznaczeniem na urządzeniu oraz zaleceniami lekarza. Dobór przepływu, czas tlenoterapii i sposób prowadzenia terapii powinny być ustalone przez osobę uprawnioną.

Sprawdź także

[Wszystkie koncentratory tlenu i urządzenia do tlenoterapii](#)

[YUWELL 8F-5A – koncentrator tlenu do 5 l/min](#)

[Przenośny koncentrator tlenu](#)